

Anaftin® Plus

Bioadhesive suusprei



Suuhaavandite ja väikeste suuvigastuste valu leevendamiseks

NÄIDUSTUS:

Anaftin® Plus Bioadhesive suusprei on mehaanilise toimega (barjääriefektiga), mis on näidustatud aftoosete haavandite, suu stomatiidi, suuhaavandite, suuärrituste ning breketitest ja proteesidest tingitud väikeste suuvigastuste ravimiseks. See on eriti näidustatud suuhaavandite ja raskesti ligipääsetavate kahjustuste korral. Selle toimemehhanismi tulemusena aitab see suu limaskestale kleepudes leevendada valu, mõjudes rahustavalt suukahjustustele, vähendades valu ja ebamugavustunnet. Sprei on valmistatud koostisainetest, millel on tugev kaitsekihti tekitav ja mukoadhesiivne toime: see moodustab barjääriefektiga kaitsekihi (või tõkestava kihi), mis kestab üle 10 tunni. See kaitseb väliste mõjurite eest, vähendades edasise ärrituse riski. Sprei kleepub suuhaavanditele ja kahjustustele, piirates kokkupuudet väliste teguritega, nagu keemilised, mehaanilised ja termilised stiimulid. Tänu oma kaitsvale toimele soodustab see füsioloogilist paranemisprotsessi.

KASUTAMINE:

Üksikute kahjustuste jaoks. Toote esmakordsel kasutamisel võtke pealmine osa maha ja pange peale pihusti. Pärast õiget suuhügieeni suunake pihusti suusisese kahjustuse suunas ja pihustage 2–4 korda, et katta kahjustatud piirkond ning et moodustuks kaitsekiht. Ärge puudutage kahjustust keelega vähemalt 2 minutit, et saaks tekkida kaitsekiht. Pihusti võimaldab tootel katta suuõone kahjustused maksimaalse efektiivsusega. Kandke toodet peale 3–4 korda päevas või vastavalt vajadusele, kuni sümptomid kaovad. Pärast 30-päevast kasutamist peatage kasutamine vähemalt üheks nädalaks, enne kui alustate ravi uuesti. Parima tulemuse saamiseks vältige söömist ja joomist vähemalt ühe tunni jooksul pärast kasutamist.

KOOSTIS:

VESI, GLÜTSEERIIN, HÜDROGEENITUD TÄRKLISE HÜDROLÜSAAT, NAATRIUMTSITRAAT, POLÜSORBAAT 80, PVM/MA KOPOLÜMEER, MALTODEKSTRIIN, PENTÜLEENGLÜKOOL, GLÜKONOLAKTOON, PEG-40 HÜDROGEENITUD RIITSINUSÖLI, PVP,

NAATRIUMHÜDROKSIID, NAATRIUMBENSOAAT, ALOE BARBADENSIS LEHE MAHL, GLÜTSEERÜÜLKAPRÜLAAT/KAPRAAT, POLÜKARBOFIIL, KSANTAANKUMMI, HARILIKU ALTEE JUURE EKSTRAKT, NAATRIUMHÜALURONAAT, SUKRALOOS, AROOMIAINE, KALTSIUMGLÜKONAAT, KAALIUMSORBAAT.

HOIATUSED:

Pärast iga kasutamist sulgege kork hoolikalt. Toote kasutamisel ei ole teadaolevaid kõrvaltoimeid, kuid see on vastunäidustatud patsientidele, kellel on teadaolev ülitundlikkus mõne koostisosa suhtes. Kui sümptomid püsivad või süvenevad, pöörduge arsti poole. Toode ei ole ette nähtud allaneelamiseks, vaid paikseks pealekandmiseks suuõnde. Toote kogemata alla neelamisel, ei ole kõrvaltoimeid oodata. Ärge kasutage pärast pakendil märgitud kõlblikkusaega. Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud või avatud. Ristsaastumise vältimiseks tuleb toodet kasutada ühel patsiendil. Vältige silma sattumist. Toodet ei ole raseduse ja imetamise ajal hinnatud. Kui olete rase/imetate, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga. Sobib lastele alates 4 eluaastast.

SÄILITAMINE:

Kõlblikkusaeg kehtib toote korral, mille pakend on avamata ja mida on õigesti säilitatud. Hoida originaalpakendis, kuivas kohas valguse- ja soojusallikast eemal. Ärge külmutage toodet. Hoida toatemperatuuril.

Suurus: 15 ml e pudel kaasas oleva pihustiga.

Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milano, Italia

Levitaja:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berliin, Saksamaa

Rev 06-2023

Sümbol						
Tähendus	Meditsiiniseadmete seaduslik tootja	CE-märgis teavitatud asutuselt	Olulise teabe saamiseks lugege kasutusjuhendit	Kasutada kuni	Partii number	Olulise teabe saamiseks lugege kasutusjuhendit

EE / V113410/01
TR2908462 OALL2FI00186