

# Anaftin® Baby

gelis dygstant dantukams

## Skausmui malšinti dygstant dantims

### Paskirtis:

Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams skirtas naudoti burnos ertmėje, siekiant sumažinti diskomfortą ir skausmą, susijusį su dantų dygimu.

Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams greitai sudaro nematomą plėvelę, kuri padeda apsaugoti danteną nuo skausmo ir diskomforto dėl dantų dygimo. Jo sudedamosios dalys padeda sumažinti skausmą ir paraudimą.

Naudojant aplikatorių su silikoniniais šereliais švelniai masažuojamos skaudančios, sudirgusios dantenos ir taip laikinai sumažinamas skausmas. Dėl to gelio tepimas mažiau vargina kūdikį, o tėvams lengviau užtepti priemonę.


Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams yra malonaus bananų skonio.

Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams yra be laktozės, cukraus, alkoholio ir vietinių anestetikų.




### Naudojimo instrukcija:

Žirnio dydžio priemonės kiekį užtepkite ant pažeistos vietos ir danteną švelniai pamasažuokite aplikatoriumi. Kūdikiams geriau užtepti po valgio ir prieš kūdikio miegą, kad geriau susidarytų plėvelė ir ilgesnį laiką būtų malšinamas skausmas. Jeigu reikia, vartokite 3-4 kartus per dieną. Po kiekvieno užtepimo aplikatorių uždenkite dangteliu. Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams tinkamas naudoti vyresniems nei 3 mėnesių amžiaus vaikams.

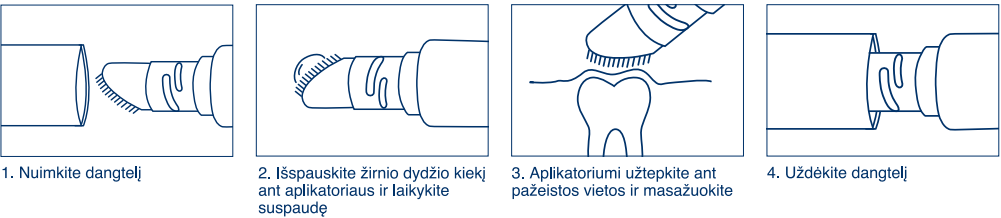

Prieš naudodami priemonę švariomis sausomis rankomis pašalinkite sudžiūvusius priemonės likučius.

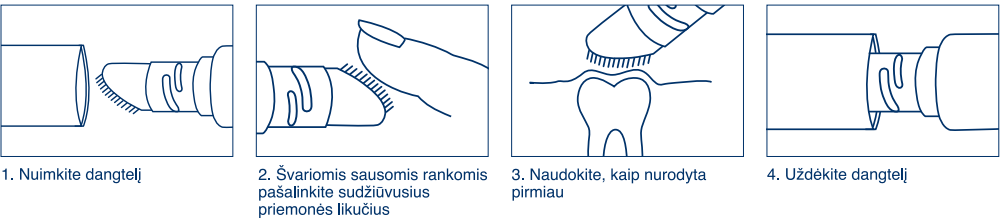

Kūdikių dantys dygsta skirtingu greičiu, tačiau tai bendrosios gairės, ko tikėtis.



- A** 5 – 7 mėnesių amžiuje apatiniai priekiniai dantys (kandžiai) paprastai išdygsta pirmiausiai.
- B** 6 – 8 mėnesių amžiuje išdygsta viršutiniai priekiniai dantys (kandžiai).
- C** 9 – 11 mėnesių amžiuje bet kurioje viršutinių priekinių dantų pusėje išdygsta viršutiniai šoniniai kandžiai.
- D** 10 – 12 mėnesių amžiuje bet kurioje apatinių priekinių dantų pusėje išdygsta apatiniai šoniniai kandžiai.
- E** 12 – 16 mėnesių amžiuje išdygsta krūminiai dantys (galiniai dantys).
- F** 16 – 20 mėnesių amžiuje išdygsta iltiniai dantys.
- G** 20 – 30 mėnesių amžiuje išdygsta antrieji krūminiai dantys (galiniai dantys).

Sudedamosios dalys:

vanduo, polivinilpirolidonas (PVP (12 %)), maltodekstrinas, propilenglikolis, PEG-40 hidrintas ricinos aliejus, alavijo (aloe barbadensis) lapų ekstraktas, daržinio kroko (crocus sativus) ekstraktas, ksantano derva, kvapioji medžiaga, kalio sorbatas, natrio benzoatas, natrio hialuronatas (0,1 %), ksilitolis, dinatrio EDTA, cetilpiridinio chloridas, gliciretino rūgštis.

Kontraindikacijos, įspėjimai ir atsargumo priemonės:

kad būtų išvengta aplikatoriaus ir gelio kryžminio užteršimo, vieną Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams tūbelę turi naudoti tik vienas pacientas. Anaftin® Baby gelio dygstant dantukams negalima naudoti pacientams, kuriems žinomas padidėjęs jautrumas bet kuriai sudedamajai daliai. Nenaudokite, jeigu esate nėščia arba manote, kad galite būti nėščia, arba žindote kūdikį. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. **Šią priemonę turėtų užtepti tik suaugusysis. DĖMESIO!** Ši medicinos priemonė nėra žaislas. **NIEKADA** nepalikite jos vaiko rankose, kad išvengtumėte užspringimo pavojaus. Prieš naudodami patikrinkite medicinos priemonę, ar nėra susidėvėjimo požymių, o tepdami gelį atkreipkite dėmesį, kad jokia aplikatoriaus galvutės sudedamoji dalis atsitiktinai neatsiskirtų. Taip nutikus, nebenaudokite. Nemėginkite uždėti atitrūkusios dalies. Nenaudokite, jeigu tūbelė atidaryta ar pažeista. Apie bet kokį incidentą, patirtą naudojant šią priemonę, reikia pranešti gamintojui [pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk](mailto:pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk). Apie rimtą sveikatos pablogėjimą, susijusį su šia priemone, taip pat reikia pranešti savo šalies kompetentingai institucijai.

Turinys: 10 ml  tūbelė.

Laikyti nuo 5°C iki 25°C temperatūroje. Pasibaigus geliui priemonės daugiau nenaudokite. Nenaudokite pasibaigus galiojimo terminui.

1 red.: 2024-07

 Alliance Pharmaceuticals Ltd.  
Avonbridge House, Bath Road  
Chippenham, Wiltširas SN15 2BB  
Jungtinė Karalystė

 Alliance Pharma (Ireland) Ltd.  
United Drug House, Magna Drive  
Dublinas D24 XOCT, Airija

 Platintojas: Berlin-Chemie AG  
Glienicke Weg 125  
12489 Berlynas, Vokietija

 1282

TR3193002  
V156334  
020722