

Uputstvo za upotrebu



Anaftin® Mouthwash

Rastvor za ispiranje usta

Anaftin® Mouthwash, rastvor za ispiranje usta, pomaže u otklanjanju bola koji nastaje usled sitnih lezija kao što su lezije izazvane aftoznim stomatitisom, aftoznim ranama kao i sitnih lezija nastalih od korektivnih proteza i loše ugrađenih veštačkih vilica. Takođe je indikovani i kod difuznih aftoznih ulceracija.

Način delovanja:

Anaftin® Mouthwash, rastvor za ispiranje usta, sadrži polivinilpirolidon (PVP) i hijaluronsku kiselinu koji formiraju zaštitni sloj koji oblaže usnu duplju i obezbeđuje mehaničku prepreku na bolnim mestima i na taj način ublažava bol koju izazivaju izloženi nervni završeci. Hijaluronska kiselina i Aloe vera u njegovom sastavu pomažu prirodno zaceľjivanje oštećenog tkiva.

Uputstvo za upotrebu:

Napunite merni poklopac do linije koja pokazuje 10 ml. Promućkajte u ustima najmanje jedan minut a zatim ispljunite. Koristiti 3 do 4 puta na dan ili po potrebi. Za optimalne rezultate, izbegavajte hranu i piće najmanje sat vremena nakon upotrebe. U slučaju gutanja, nije potrebno preduzimati dodatne mere.

Sastav:

Aqua, polivinilpirolidon (PVP), maltodekstrin, propilen glikol, *Aloe barbadensis*, hidroksietil celuloza, kalijum sorbat, natrijum benzoat, PEG-40 hidrogenizovano ricinusovo ulje, dinatrijum EDTA, benzalkonijum hlorid, natrijum hijaluronat, aroma, natrijum saharin, dikalijum glicirhizinat

Oprez:

Upotreba Anaftin® Mouthwash rastvora za ispiranje usta je kontaindikovana kod pacijenata koji su preosetljivi na neki od sastojaka.

Ukoliko ste u drugom stanju, posavetujte se sa lekarom pre upotrebe proizvoda. Ukoliko često patite od ranica u ustima, potražite savet lekara.

Mere predostrožnosti i upozorenja:

Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja ili ako primetite da je boćica oštećena ili curi. Čuvati van domašaja dece. Čuvati na sobnoj temperaturi daleko od direktnog izvora toplote. Ne zamrzavati.

Sadržaj:

120 ml

Ovlašćeni predstavnik proizvođača:

BERLIN-CHEMIE
A. MENARINI DISTRIBUTION D.O.O.
Đorđa Stanojevića 14,
Beograd (Novi Beograd)

Proizvođač:

Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5,
20124 Milano, Italija



Distributeri:

- Farmalogist d.o.o.
Mirijski bulevar 3
11 060 Beograd, Palilula
- Vega d.o.o
Vuka Karadžića 41
14 000 Valjevo
- Phoenix pharma d.o.o.
Bore Stankovića 2
11 250 Beograd, Makiš

Broj rešenja o upisu u Registar medicinskih sredstava: 515-02-05469-22-003 od 16.01.2023.

RS / V150519/01
TR3181356
OALL2FI00159