

Alobaby®

Primeiros Dentes

Para o alívio da dor de dentição

Uso pretendido:

Alobaby® Primeiros Dentes destina-se a ser utilizado na cavidade oral para aliviar o desconforto e a dor associados à dentição: a erupção de um dente.

Alobaby® Primeiros Dentes forma rapidamente uma película invisível que ajuda a proteger as gengivas da dor e do desconforto associados à dentição. Os seus ingredientes ajudam a reduzir a dor e a vermelhidão nas zonas afetadas.

O aplicador tem cerdas de silicone que massajam suavemente as gengivas doridas e irritadas e que, durante a aplicação, podem proporcionar um alívio temporário da dor. Isto torna a aplicação do gel menos incómoda para o bebé e mais fácil para os pais aplicarem o produto.


Alobaby® Primeiros Dentes tem um sabor agradável a banana.

Alobaby® Primeiros Dentes não contém lactose, açúcar, álcool nem anestésico local.




Instruções de utilização:

Aplicar uma quantidade suficiente de produto (equivalente ao tamanho de uma ervilha) na área afetada e massajar suavemente as gengivas com o aplicador. Aplicar de preferência após as refeições e antes de dormir, de modo a facilitar a formação de película e prolongar o alívio da dor do bebé/criança. Utilizar 3-4 vezes por dia, conforme as necessidades. Após cada aplicação, voltar a colocar a tampa na parte superior do aplicador. Alobaby® Primeiros Dentes é adequado para crianças com mais de 3 meses de idade.

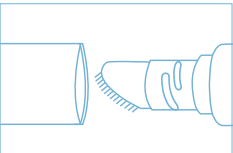


1. Retirar a tampa

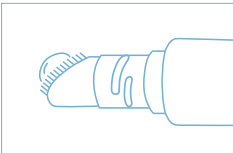

2. Espremer uma quantidade do tamanho de uma ervilha no aplicador e manter comprimido




3. Aplicar na zona afetada e massajar com o aplicador

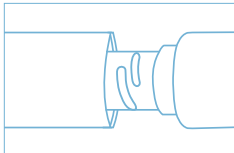


4. Voltar a colocar a tampa

Antes de cada aplicação, remover quaisquer resíduos secos de gel com as mãos limpas e secas.

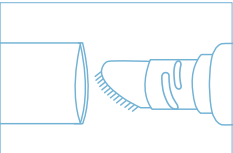


1. Retirar a tampa

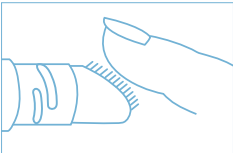

2. Remover os resíduos secos de gel com as mãos limpas e secas




3. Utilizar como indicado em cima

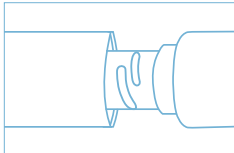

4. Voltar a colocar a tampa

Os bebés têm ritmos diferentes para o aparecimento dos dentes, mas este é um guia geral do que se pode esperar:

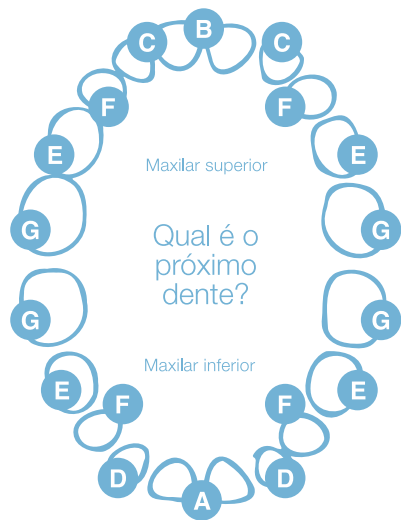

- A** 5 – 7 meses
Os dentes frontais inferiores (incisivos) normalmente surgem primeiro.
- B** 6 – 8 meses
Surgem os dentes frontais superiores (incisivos).
- C** 9 – 11 meses
Surgem os incisivos laterais superiores, de ambos os lados dos dentes centrais superiores.
- D** 10 – 12 meses
Surgem os incisivos laterais inferiores, de ambos os lados dos dentes centrais inferiores.
- E** 12 – 16 meses
Surgem os molares (dentes de trás).
- F** 16 – 20 meses
Surgem os caninos.
- G** 20 – 30 meses
Surgem os segundos molares (dentes de trás).

Composição:
Aqua, PVP (12%), maltodextrin, propylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, aloe barbadensis leaf extract, crocus sativus extract, xanthan gum, aroma, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium hyaluronate (0.1%), xylitol, disodium EDTA, cetylpyridinium chloride, glycyrrhethinic acid.

Contraindicações, advertências e precauções de utilização:
Cada tubo de Alobaby® Primeiros Dentes deve ser utilizado num único doente para evitar a contaminação cruzada do aplicador e do gel. A utilização de Alobaby® Primeiros Dentes está contraindicada em doentes com um historial de hipersensibilidade a qualquer um dos ingredientes. Não utilizar se estiver grávida ou se pensa que está grávida ou a amamentar. Manter fora do alcance das crianças. **O produto deve ser unicamente aplicado por um adulto. ATENÇÃO:** Este dispositivo médico não é um brinquedo. **NUNCA** deixar o produto nas mãos de uma criança para evitar o risco de asfixia. Antes de utilizar este dispositivo médico, verifique que não existem sinais de danos e durante a aplicação do gel, preste atenção, para garantir que nenhum dos componentes da cabeça do aplicador se desprende acidentalmente. Caso ocorra, suspenda imediatamente a sua utilização. Não tente colocar no lugar as peças que se desprenderam. Não utilizar se o tubo estiver aberto ou danificado. Qualquer incidente que tenha ocorrido durante a utilização deste produto deve ser comunicado ao distribuidor dac.mbx@jaba-recordati.pt. Qualquer agravamento sério do estado de saúde relacionado com a utilização deste produto também deve ser comunicado à autoridade competente do seu país.

Conteúdo: tubo de 10 ml e
Armazenar entre 5°C e 25°C. Deixar de utilizar o dispositivo quando o gel acabar. Não utilizar após o prazo de validade.

Alobaby®, Alliance e dispositivos associados são marcas registadas da Alliance Pharmaceuticals Limited.
Rev 1: 2024-07

Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire SN15 2BB,
Reino Unido

Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 X0CT, Irlanda

www.alliancepharmaceuticals.com

Distribuído em Portugal por:
Jaba Recordati, S.A.
Av. Jacques Delors
Ed. Inovação 1.2. Piso 0 - Taguspark
2740-122 Porto Salvo, Portugal

Dispositivo médico

1282

TR3203138
020777

ALOVDEN10ML.JABA