

Anaftin® Plus

Bioadhesive

aktív szájöblítő



Fájdalomcsillapítás aftás fekélyek és kisebb szájsebek esetén

JAVALLAT:

Az Anaftin® Plus Bioadhesive aktív szájöblítő mechanikai védelmi hatása révén (fizikai gátat képez) az aftás fekélyek, szájgyulladás, szájsebek, szájüregi irritációk, valamint a fogszabályzók és fogpótlások miatt kialakuló kisebb száj sérülések okozta tünetek kezelésére javallott. A teljes szájüregre kiterjedő megelőző és védő hatása révén a szájöblítő az ismétlődő fekélyek esetében is használható. Hatásmechanizmusa révén a szájüregi nyálkahártyához tapadva csökkenti a fájdalmat, enyhíti a száj sérüléseket, továbbá csökkenti a kellemetlen érzetet. A szájöblítő kiváló filmképző tulajdonságokkal rendelkező és a nyálkahártyához jól tapadó összetevőkből készült: több mint 10 óráig tartó fizikai gátat képző védőfilmet alakít ki. Védelmet nyújt a külső behatások ellen, ezáltal minimálisra csökkenti a további irritációt. Az aftás fekélyekhez és sérülésekhez tapadó szájöblítő korlátozza a külső behatásokkal, köztük a kémiai, mechanikai és hőingerekkel való érintkezést. Védő hatásának köszönhetően segíti a gyógyulás élettani folyamatának kezelését.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Használat előtt alaposan rázza fel. Öblögesse a szájüregét 15-20 ml szájöblítővel (használja a mérőkupakot a szükséges mennyiség kiméréséhez) legalább 1 percig vagy a lehető leghosszabb ideig annak biztosítása érdekében, hogy alaposan bevonja a nyelvet, a szájpadot, az orcák belső oldalát és minden szájüregi szövetet. Gargarizáljon, majd köpje ki a szájöblítőt. Használja lehetőleg szájigiéné után naponta 2-3 alkalommal vagy szükség szerint, amíg el nem múlnak a tünetek. Harminc napi alkalmazás után tartson legalább egy hetes szünetet a kezelés újrakezdése előtt. A készítmény használatra kész, ne hígítsa. A készítmény jobb hatásossága érdekében az alkalmazás után legalább egy óráig kerülje az evést és ivást.

ÖSSZETÉTEL:

VÍZ, GLICERIN, NÁTRIUM-CITRÁT, HIDROGÉNEZETT KEMÉNYÍTŐ-HIDRALIZÁTUM, POLISZORBÁT 80, MALTODEXTRIN, PVM/MA KOPOLIMER, PENTILÉN-GLIKOL, GLÜKONOLAKTON, XANTANGUMI, PEG-40 HIDROGÉNEZETT RICINUSOLAJ, PVP, NÁTRIUM-BENZOÁT, NÁTRIUM-HIDROXID, ALOE BARBADENSIS LEVÉL

NEDVE, GLICERIL-KAPRILÁT/KAPRÁT, POLIKARBOFIL, ALTHAEA OFFICINÁLIS GYÖKÉR KIVONATA, NÁTRIUM-HIALURONÁT, SZUKRALÓZ, AROMA, KALCIUM-GLUKONÁT, KALIUM-SZORBÁT.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A kupakot minden használat után vissza kell zárni. Nincsenek a termék használatából adódó ismert mellékhatások, de a termék használata ellenjavallt az összetevők bármelyikével szembeni ismert túlérzékenység esetén. Forduljon kezelőorvosához, ha a tünetek nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. A készítményt a szájüregben kell helyileg alkalmazni, és nem szabad lenyelni. A készítmény véletlen lenyelése esetén nem várhatók mellékhatások. A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza ezt a készítményt. A készítmény gyermekektől elzárva tartandó! Ne használja, ha a csomagolás sérült vagy fel van nyitva. A keresztszennyeződés elkerülése érdekében csak egyetlen betegnél szabad használni a készítményt. Kerülni kell a szembe jutást. A készítményt terhesség és szoptatás során nem értékelték. Ha Ön terhes vagy szoptat, akkor használat előtt beszéljen kezelőorvosával. Gyermekeknél 4 éves kortól alkalmazható.

TÁROLÁS:

A lejárati idő megfelelően tárolt, bontatlan csomagolásban lévő készítményre vonatkozik. Az eredeti csomagolásban, száraz helyen, fénytől és hőforrásoktól védve tárolandó. Ne tárolja hűtőszekrényben a készítményt. Szobahőmérsékleten tárolandó.

Méret: 120 ml  flakon és mérőkupak (orvostechnikai eszköz CE 0373).

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milánó, Olaszország

Orvostechnikai eszköz

Forgalmazó:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Németország

Felülvizsgálat dátuma:

2023. június

Szimbólum		 0477				
Magyarázat	Az orvostechnikai eszköz jogszertu gyartója	CE-jeloles es bejelentett szervezet	Fontos informáciokért olvassa el a használati utasítást	Lejáratí idó	Gy.sz.	Fontos informáciokért olvassa el a használati utasítást

HU / V126573/01
TR2900993 OALL2FI00177