

Anaftin® Plus

Bioadhesive

Bioadhezyjny
płyn do płukania jamy ustnej



Ulga w bólu związanym z owrzodzeniami i małymi zmianami w jamie ustnej

WSKAZANIE:
Anaftin® Plus Bioadhesive bioadhezyjny płyn do płukania jamy ustnej ma działanie mechaniczne (efekt bariery) i stosowany jest w leczeniu objawów spowodowanych owrzodzeniami aftowymi, zapaleniem jamy ustnej, owrzodzeniami jamy ustnej, podrażnieniami jamy ustnej i drobnymi urazami jamy ustnej spowodowanymi aparatami ortodontycznymi i protezami zębowymi. W szczególności płyn do płukania może być stosowany w przypadku nawracających owrzodzeń, ze względu na swoje działanie zapobiegawcze i ochronne całej jamy ustnej. Jego mechanizm działania powoduje ulgę w bólu poprzez przyleganie do powierzchni błonowej w jamie ustnej, łagodzenie zmian, zmniejszenie bólu i dyskomfortu. Płyn do płukania jamy ustnej zawiera wysoce mukoadhezyjne składniki o dużej zdolności do tworzenia filmu. Tworzy on warstwę ochronną stanowiącą barierę (lub tarczę), która utrzymuje się ponad 10 godzin. Chroni przed czynnikami zewnętrznymi, minimalizując ryzyko dalszych podrażnień. Płyn do płukania jamy ustnej pokrywa owrzodzenia i zmiany chorobowe w jamie ustnej, ograniczając kontakt z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak bodźce chemiczne, mechaniczne i termiczne. Dzięki działaniu ochronnemu wspomaga fizjologiczny proces gojenia.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed użyciem wstrząsać. Odmierzyć 15–20 ml płynu za pomocą miarki i płukać jamę ustną przez co najmniej 1 minutę lub tak długo, jak to możliwe, aby płyn dokładnie pokrył język, podniebienie, wewnętrzne części policzków i całą jamę ustną. Przepłukać gardło i wypluć. Stosować 2–3 razy na dobę lub w razie potrzeby, najlepiej po higienie jamy ustnej, aż do ustąpienia objawów. Po trzydziestu dniach stosowania odstawić na co najmniej tydzień przed wznowieniem leczenia. Produkt gotowy do użycia, nie rozcieńczać. Aby zapewnić wyższą skuteczność produktu, nie należy jeść ani pić przez co najmniej jedną godzinę po jego zastosowaniu.

SKŁAD:
Woda, gliceryna, cytrynian sodu, uwodorniony hydrolizat skrobi, polisorbit 80, maltodekstryna, kopolimer PVM/MA, glikol pentylenowy, glukonolakton, guma ksantanowa, PEG-40 uwodorniony olej

rycynowy, PVP, benzoesan sodu, wodorotlenek sodu, sok z liści aloesu zwyczajnego, kaprylan glicerylu, polikarbofil, wyciąg z korzenia Althaea officinalis, hialuronian sodu, sukraloza, aromat, glukonian wapnia, sorbinian potasu.

OSTRZEŻENIA:
Po każdym użyciu ostrożnie zamknąć nakrętkę. Nie są znane żadne działania niepożądane wynikające ze stosowania tego produktu, jednak jest on przeciwwskazany u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek ze składników. Jeśli objawy będą się utrzymywać lub nasilać się, należy zasięgnąć porady lekarza. Produkt nie jest przeznaczony do spożycia, lecz do stosowania miejscowego w jamie ustnej. W razie przypadkowego połknięcia produktu nie przewiduje się wystąpienia żadnych działań niepożądanych. Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone lub otwarte. Produkt powinien być używany przez jedną osobę, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego. Unikać kontaktu z oczami. Stosowanie produktu nie zostało ocenione w czasie ciąży i karmienia piersią. Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem produktu. Produkt odpowiedni dla dzieci od 4 roku życia.

PRZECHOWYWANIE:
Termin ważności odnosi się do nienaruszonego, prawidłowo przechowywanego produktu. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od światła i źródeł ciepła. Nie przechowywać produktu w lodówce. Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Wielkość: butelka **120 ml** e z miarką w nakrętkę (wyrób medyczny CE 0373).

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milan, Włochy

Dystrybutor:
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji: 06-2023

Symbol		 0477				
Znaczenie	Legalny producent wyrobów medycznych	Znak CE nadany przez jednostkę notyfikowaną	Zapoznać się z instrukcją użycia, aby uzyskać ważne informacje	Termin ważności	Numer serii	Zapoznać się z instrukcją użycia, aby uzyskać ważne informacje

TR2908428
OALL2FI00190
PL / V109322/01