

# Anaftin® Baby fogínygél

## A fogzási fájdalom enyhítésére

### Rendeltetésszerű alkalmazás:

Az Anaftin® Baby fogínygél a szájüregben történő alkalmazásra szolgál a fogzással (a fog előbújásával) járó kellemetlen érzés és fájdalom enyhítésére.

Az Anaftin® Baby fogínygél rövid idő alatt láthatatlan filmet képez, amely megvédi az ínyt a fogzással járó fájdalomtól és kellemetlen érzéstől. Összetevői révén segít enyhíteni a fájdalmat és a kipirosodást az érintett területeken.

Alkalmazás közben a szilikonszállakkal ellátott applikátor finoman masszírozza a fájó, irritált fogínyt, és átmeneti fájdalomcsillapítást biztosíthat. Ily módon a gél felvitele kevésbé megterhelő a csecsemő számára, és a szülő dolgát is megkönnyíti.


Az Anaftin® Baby fogínygél kellemes banán ízesítésű.

Az Anaftin® Baby fogínygél nem tartalmaz laktózt, cukrot, alkoholt vagy helyi érzéstelenítőt.




### Használati utasítás:


Vigyen fel borsónyi mennyiséget a termékből az érintett területre, és az applikátorral finoman masszírozza a fogínyt. A gél ajánlott étkezések után és alvás előtt alkalmazni, mert ez elősegíti a filmképződést és tartósan enyhíti a baba fájdalmát. Használja napi 3-4 alkalommal, szükség szerint. Minden egyes alkalmazás után helyezze vissza a kupakot az applikátorra. Az Anaftin® Baby fogínygél 3 hónaposnál idősebb gyermekeknél alkalmazható.

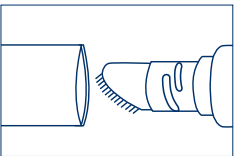


1. Vegye le a kupakot

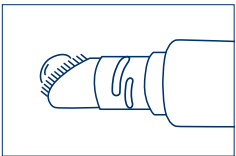

2. Nyomjon ki borsónyi mennyiséget az applikátorra és tartsa összenyomva a tubust

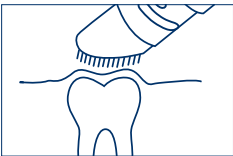


3. Alkalmazza az érintett területen és masszírozza az applikátorral

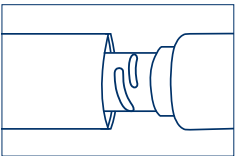


4. Tegye vissza a kupakot

A termék használata előtt tiszta, száraz kézzel távolítsa el a megszáradt termékmaradványokat.

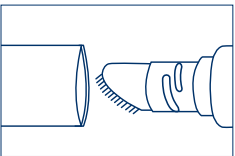


1. Vegye le a kupakot

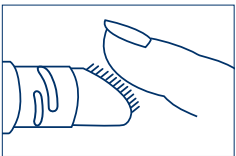

2. Tiszta, száraz kézzel távolítsa el a megszáradt termékmaradványokat



3. Használja a fentiek szerint

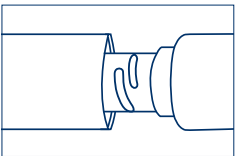

4. Tegye vissza a kupakot

A babák fogai különböző ütemben bújnak elő, de az alábbi egy általános útmutató arról, hogy mire számíthat.



- A** 5 – 7 hónapos kor  
Először általában az alsó elülső fogak (metszőfogak) bújnak elő
- B** 6 – 8 hónapos kor  
Előbújnak a felső elülső fogak (metszőfogak)
- C** 9 – 11 hónapos kor  
Előbújnak a felső oldalsó metszőfogak, a felső elülső fogak mindkét oldalán
- D** 10 – 12 hónapos kor  
Előbújnak az alsó oldalsó metszőfogak, az alsó elülső fogak mindkét oldalán
- E** 12 – 16 hónapos kor  
Előbújnak a zápfogak (hátsó fogak)
- F** 16 – 20 hónapos kor  
A szemfogak előbújnak
- G** 20 – 30 hónapos kor  
Előbújnak a második zápfogak (hátsó fogak)

**Összetevők:**

Víz, PVP (12%), maltodextrin, propilénglikol, PEG-40 hidrogénezett ricinusolaj, Aloe barbadensis levélkivonat, Crocus sativus kivonat, xantán gumi, aroma, kálium-szorbát, nátrium-benzoát, nátrium-hialuronát (0,1%), xilit, dinátrium-EDTA, cetilpiridinium-klorid, glicirretinsav.

**Ellenjavallatok, figyelmeztetések és óvintézkedések:**

Az applikátor és a gél keresztszennyezésének elkerülése érdekében az Anaftin® Baby fogínygél tubust csak egy beteg alkalmazhatja. Az Anaftin® Baby fogínygél használata ellenjavallt az összetevők bármelyikével szembeni ismert túlérzékenység esetén. Ne használja, ha terhes, ha úgy gondolja, hogy terhes, vagy ha szoptat. Gyermekektől elzárva tartandó. **A terméket kizárólag felnőtt alkalmazhatja. VIGYÁZAT:** Ez az orvostechnikai eszköz nem játék. A fulladásveszély elkerülése érdekében **SOHA** ne adja gyermek kezébe. Használat előtt ellenőrizze az orvostechnikai eszköz épségét, és a gél alkalmazása közben ügyeljen arra, hogy az applikátorfej részei ne válhassanak le véletlenül. Ha ez mégis megtörténik, ne használja tovább az applikátort. Ne próbálja visszahelyezni a levált részt. Ne használja, ha a tubus fel van nyitva vagy megsérült. A termék használata során tapasztalt bármilyen incidenst jelenteni kell a gyártónak a [pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk](mailto:pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk) címen. A termékkel kapcsolatban bekövetkezett súlyos egészségkárosodást szintén jelenteni kell az adott ország illetékes hatóságának.

**Tartalom: 10 ml-es E tubus.**

**Tárolási hőmérséklet: 5 °C és 25 °C között tárolandó. Ha a gél elfogy, ne használja tovább az eszközt.**

**Ne használja a lejáratí időn túl.**

Rev 1: 2024-06

 Alliance Pharmaceuticals Ltd.  
Avonbridge House, Bath Road,  
Chippenham, Wiltshire SN15 2BB,  
Egyesült Királyság

 Alliance Pharma (Ireland) Ltd.  
United Drug House, Magna Drive,  
Dublin D24 X0CT, Írország

 Forgalmazó: Berlin-Chemie AG  
Glienicke Weg 125  
12489 Berlin, Németország

    Orvostechnikai eszköz  
 [www.alliancepharmaceuticals.com](http://www.alliancepharmaceuticals.com)

 1282

TR3200731  
V156364  
020752