



L'uso di **ALOVEX® DENTIZIONE** è indicato nella cavità orale per alleviare il fastidio e il dolore associati alla dentizione: eruzione dentaria.

ALOVEX® DENTIZIONE forma rapidamente una pellicola invisibile che protegge la gengiva dal fastidio e dal dolore provocati dalle eruzioni dentarie nell'infanzia.

I componenti di **ALOVEX® DENTIZIONE** aiutano a ridurre la sensazione di dolore e l'arrossamento della zona interessata.



L'applicatore è munito di setole di silicone che permettono di massaggiare dolcemente la gengiva donando un piacevole sollievo dal fastidio e da tutti i sintomi correlati alle eruzioni dentarie.

ALOVEX® DENTIZIONE non contiene anestetici locali, alcool e zucchero.

ALOVEX® DENTIZIONE non brucia quando si applica ed ha un gradevole gusto alla banana.

ALOVEX® DENTIZIONE è adatto per l'uso nei bambini di età superiore ai 3 mesi.

ISTRUZIONI D'USO Applicare una quantità pari a un pisello di prodotto sulla zona interessata e massaggiare delicatamente le gengive con l'applicatore. Nei neonati, applicare preferibilmente dopo i pasti e prima di mettere a dormire il bambino per favorire la formazione del film e prolungare il sollievo dal dolore. Utilizzare 3-4 volte al giorno secondo necessità. Dopo ogni applicazione, porre di nuovo il cappuccio sulla parte superiore dell'applicatore. Prima di riutilizzare il prodotto rimuovere eventuali residui secchi con le mani pulite e asciutte.

INGREDIENTI: acqua, PVP (12%), maltodestrina, glicole propilenico, olio di ricino idrogenato PEG-40, estratto di foglie di aloe vera, estratto di crocus sativus, gomma xantana, aroma, potassio sorbato, sodio benzoato, sodio ialuronato (0,1%), xilitolo, disodio EDTA, cetilpiridinio cloruro, acido glicirretinico.



Controindicazioni, Avvertenze e Precauzioni d'uso

ATTENZIONE

L'uso di ALOVEX® DENTIZIONE è controindicato in caso di ipersensibilità ad uno qualsiasi degli ingredienti.

Ciascun tubetto di ALOVEX® DENTIZIONE deve essere utilizzato su un singolo paziente per evitare la contaminazione crociata dell'applicatore e del gel.

Non usare in gravidanza o se si sospetta una gravidanza, o durante l'allattamento.

Il prodotto deve essere applicato esclusivamente da una persona adulta.


Attenzione: Questo dispositivo medico non è un giocattolo.

Non lasciare MAI il dispositivo medico nelle mani del bambino per evitare il rischio di soffocamento.

Verificare prima dell'uso che il dispositivo medico non presenti segni di lacerazione o usura e prestare attenzione che durante l'applicazione del gel non si verifichi l'accidentale distacco di nessuna delle parti costituenti la testa dell'applicatore. In tal caso interromperne l'uso. Non tentare di rimettere in sede le parti distaccatesi.

Sospendere l'utilizzo del dispositivo ad esaurimento del gel contenuto.

Non utilizzare il prodotto se il tubo è aperto o danneggiato. Conservare tra +5 °C e +25 °C. Non utilizzare dopo la data di scadenza. Tenere lontano dalla portata dei bambini.

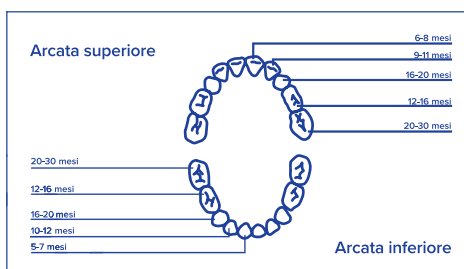

Qualsiasi incidente riscontrato durante l'utilizzo di questo prodotto deve essere segnalato al produttore pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Qualsiasi grave deterioramento della salute verificatosi in relazione a questo prodotto deve essere segnalato anche all'autorità competente del proprio Paese.

CONTENUTO: 10 ML

CAMPIONE RIDOTTO

GRATUITO 4 ML



MISTO
Carta | A sostegno della
gestione forestale responsabile
FSC® C117079

Alliance Pharmaceuticals Ltd,
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire,
SN15 2BB, United Kingdom

Recordati Industria Chimica e
Farmaceutica S.p.A. Via Matteo
Civitali, 1 - 20148 Milano, Italy

EC REP Alliance Pharma (Ireland) Ltd,
United Drug House,
Magna Drive, Dublin,
D24 X0CT, Ireland



www.alovex.it

25°C
5°C



RECORDATI

Rev 2: 08-2024

TR2959066 020324 1748 G