

Anaftin® Baby

Teething gel

Za ublažavanje bola kod nicanja zuba

Namjena:

Anaftin® Baby Teething Gel je namijenjen primjeni u usnoj šupljini za ublažavanje nelagode i bola kod nicanja zuba: izbijanja zuba.

Anaftin® Baby Teething Gel brzo formira nevidljiv film koji pomaže u zaštiti desni od bola i nelagode kod nicanja zuba. Njegovi sastojci pomažu u ublažavanju bola i crvenila zahvaćenih područja.

Tokom primjene, aplikator koji sadrži silikonske dlačice nježno masira bolne, nadražene desni i može pružiti privremeno ublažavanje bola tokom primjene. To nanošenje gela čini manje uznemirujućim za bebu i lakšim za roditelje pri nanošenju proizvoda.


Anaftin® Baby Teething Gel ima prijatan okus banane.

Anaftin® Baby Teething Gel ne sadrži laktozu, šećer, alkohol i lokalne anestetike.




Uputstvo za upotrebu:

Nanesite količinu proizvoda veličine zrna graška na zahvaćeno područje i nježno masirajte desni aplikatorom. Kod beba je poželjna primjena nakon obroka a prije nego što beba zaspi kako bi se omogućilo formiranje zaštitnog sloja i produžio period ublažavanja bola. Koristiti 3-4 puta dnevno po potrebi. Vratite poklopac na vrh aplikatora nakon svake primjene. Anaftin® Baby Teething Gel je pogodan za primjenu kod djece starije od 3 mjeseca.

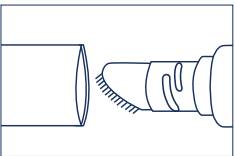


1. Uklonite poklopac

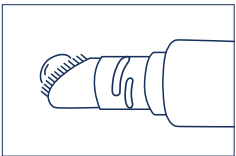

2. Istisnite količinu veličine zrna graška na aplikator i držite aplikator stisnut




3. Nanesite na zahvaćeno područje i umasirajte aplikatorom

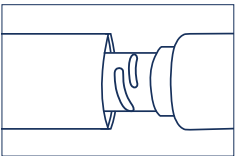


4. Vratite poklopac

Uklonite osušene ostatke čistim i suhim rukama prije primjene proizvoda

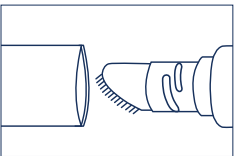


1. Uklonite poklopac

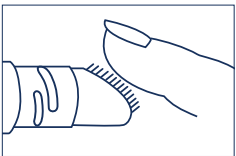

2. Osušene ostatke uklonite čistim i suhim rukama



3. Koristite kako je navedeno iznad

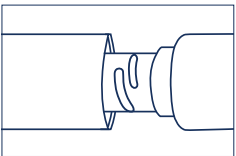

4. Vratite poklopac

Svim bebama zubi niču različitom brzinom, ali ovo je opšti vodič o tome šta očekivati



- A** 5 – 7 mjeseci
Obično prvi niču donji prednji zubi (sjekutići).
- B** 6 – 8 mjeseci
Niču gornji prednji zubi (sjekutići).
- C** 9 – 11 mjeseci
Niču gornji bočni sjekutići, s obje strane gornjih prednjih zuba
- D** 10 – 12 mjeseci
Niču donji bočni sjekutići, s obje strane donjih prednjih zuba
- E** 12 – 16 mjeseci
Niču kutnjaci (stražnji zubi)
- F** 16 – 20 mjeseci
Niču očnjaci
- G** 20 – 30 mjeseci
Niču drugi kutnjaci (stražnji zubi)

Sastojci:

Voda, polivinilpirolidon (PVP) (12%), maltodekstrin, propilen glikol, PEG-40 hidrogenizovano ricinusovo ulje, ekstrakt lista aloe barbadensis, ekstrakt šafrana, ksantan guma, aroma, kalijum sorbat, natrijum benzoat, natrijum hijaluronat (0,1%), ksilitol, dinatrijum EDTA, cetilpiridinijum hlorid, gliciretinska kiselina.

Kontraindikacije, upozorenja i mjere opreza:

Svaku tubu Anaftin® Baby Teething Gel treba koristiti individualno kako bi se izbjegla unakrsna kontaminacija aplikatora i gela. Primjena Anaftin® Baby Teething Gel je kontraindikovana kod pacijenata s poznatom preosjetljivošću na bilo koji sastojak proizvoda. Nemojte koristiti ako ste trudni ili mislite da ste trudni te ako dojite. Držite van dohvata djece. **Proizvod smiju nanositi samo odrasli. OPREZ:** Ovo medicinsko sredstvo nije igračka. **NIKADA** ga ne ostavljajte u rukama djeteta kako biste izbjegli rizik od gušenja. Prije upotrebe provjerite da li postoje znakovi oštećenja medicinskog sredstva i tokom nanošenja gela vodite računa o tome da ne dođe do slučajnog odvajanja nekog dijela glave aplikatora. Ako do toga ipak dođe, odmah ga prestanite koristiti. Ne pokušavajte ponovo sastaviti odvojeni dio. Nemojte koristiti ako je tuba otvorena ili oštećena. Svaki neželjeni događaj do kojeg dođe tokom upotrebe ovog proizvoda treba prijaviti proizvođaču na pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Ozbiljno pogoršanje zdravstvenog stanja koje je nastupilo u vezi s ovim proizvodom također treba prijaviti nadležnom tijelu u vašoj državi.

Sadržaj: tuba od 10 ml 

Čuvajte na temperaturi između 5°C i 25°C. Prestanite koristiti ovo medicinsko sredstvo kada se gel potroši. Nemojte koristiti nakon isteka roka trajanja.

Revizija 1: 6/2024

 Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire SN15 2BB,
Velika Britanija

 Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
 United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 X0CT, Republika Irska

 Zastupnik za Bosnu i Hercegovinu:
Berlin-Chemie/Menarini BH d.o.o.
Hasana Brkića 2/II
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole:
06-07.4-1-9154-2/24 od 04.08.2025.



Medicinsko sredstvo



www.alliancepharmaceuticals.com

TR3192982
V156331
020734