

Aloclair® PLUS

BIOADHESIVE

Spray Bioadhesivo 15ml e

ALIVIO DEL DOLOR DE LAS AFTAS Y DE LAS PEQUEÑAS LESIONES BUCALES

INDICACIONES

Aloclair® Plus Bioadhesive Spray Bioadhesivo presenta una acción mecánica (efecto barrera) indicada para el tratamiento de los síntomas causados por úlceras aftosas, estomatitis ulcerosa, llagas bucales, irritaciones bucales y pequeñas lesiones orales causadas por los aparatos de ortodoncia y las prótesis dentales. Está especialmente indicado para las úlceras bucales y las lesiones de difícil acceso. Su mecanismo de acción produce un alivio del dolor al adherirse a la superficie de la mucosa bucal, calmando las lesiones orales y reduciendo el dolor y las molestias. El spray está formulado con ingredientes con alto poder mucoadhesivo y alta capacidad para crear una película protectora: crea un efecto barrera (o escudo) que dura más de 10 horas. Protege de los agentes externos, minimizando el riesgo de una mayor irritación. El spray se adhiere a las úlceras y lesiones bucales limitando el contacto con agentes externos como los estímulos químicos, mecánicos y térmicos. Gracias a su acción protectora, ayuda al control del proceso natural de cicatrización.

INGREDIENTES

AQUA, GLYCERIN, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, SODIUM CITRATE, POLYSORBATE 80, PVM/MA COPOLYMER, MALTODEXTRIN, PENTYLENE GLYCOL, GLUCONOLACTONE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PVP, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM BENZOATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE, POLYCARBOPHIL, XANTHAN GUM, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, SUCRALOSE, AROMA, CALCIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE.

INSTRUCCIONES DE USO

Para lesiones localizadas. Cuando utilice el producto por primera vez, retire el tapón y coloque el pulverizador. Después de una correcta higiene bucal, dirija el pulverizador hacia la lesión en el interior de la boca y pulverice 2-4 veces para cubrir la zona afectada y crear una película protectora. No toque la lesión con la lengua durante, al menos, dos minutos para permitir la formación de la película protectora. El pulverizador permite que el producto cubra las lesiones bucales con la máxima eficacia. Aplique el producto 3 o 4 veces al día, o cuando sea necesario, hasta que desaparezcan los síntomas. Tras treinta días de uso, interrumpa el tratamiento durante al menos una semana antes de reiniciarlo. Para lograr un mejor resultado, no coma ni beba durante al menos una hora después de la aplicación.

ADVERTENCIAS

Vuelva a colocar el tapón con cuidado después de cada uso. No se conocen efectos adversos derivados del uso del producto; sin embargo, está contraindicado en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes. Si los síntomas persisten, o en caso de que empeoren, consulte a su médico.

El producto no se ha diseñado para ser ingerido, sino para su aplicación tópica en la cavidad bucal. En caso de ingestión accidental del producto, no se prevén efectos adversos. No utilice este producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. Mantener fuera de la vista y del alcance de los niños. No utilizar si el envase está dañado o abierto. El producto debe utilizarse en un solo paciente para evitar la contaminación cruzada. Evite el contacto con los ojos. El producto no ha sido evaluado durante el embarazo y la lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, consulte a su médico antes de utilizarlo. Apto para niños a partir de 4 años.

CONSERVACIÓN

La fecha de caducidad se refiere al producto intacto y correctamente almacenado. Conservar en el envase original, en un lugar seco y alejado de la luz y de fuentes de calor. No refrigerar el producto. Conservar a temperatura ambiente.

Presentación: frasco de 15 ml con un pulverizador envuelto.

Aloclair® Alliance y dispositivos sanitarios asociados son marcas registradas del grupo Alliance Pharma PLC©.

Símbolo						
Significado	Fabricante legal del producto sanitario	Marca CE del organismo notificado	Consulte información importante en las instrucciones de uso	Fecha de caducidad	Número de lote	Consulte información importante en las instrucciones de uso

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milano ITALY

 ALLIANCE

 ITALFARMACO s.a.

Rev 03-2023

Distribuido en España por:

Italfarmaco S.A.

San Rafael, 3

28108 Alcobendas

(Madrid)

www.aloclairplus.es

211298/08
0ALL2FI00146 TR2713925