

Anaftin® Plus

Bioadhesive

nyugtató gél



Fájdalomcsillapítás aftás fekélyek és kisebb szájsebek esetén

JAVALLAT:

Az Anaftin® Plus Bioadhesive nyugtató gél mechanikai védelmi hatása révén (fizikai gátat képez) az aftás fekélyek, szájgyulladás, szájsebek, szájüregi irritációk, valamint a fogszabályzók és fogpótlások miatt kialakuló kisebb szájsérülések okozta tünetek kezelésére javallott. Hatásmechanizmusa révén a szájüregi nyálkahártyához tapadva csökkenti a fájdalmat, enyhíti a szájsérüléseket, továbbá csökkenti a kellemetlen érzetet. Az Anaftin® Plus Bioadhesive nyugtató gél állaga és a speciális applikátor különösen javallott a jól látható és azonosított sérülések kezelésére. A gél kiváló filmképző tulajdonságokkal rendelkező és a nyálkahártyához jól tapadó összetevőkből készült: több mint 12 óráig tartó fizikai gátat képző védőfilmet alakít ki. Védelmet nyújt a külső behatások ellen, ezáltal minimálisra csökkenti a további irritációt. Az aftás fekélyekhez és sérülésekhez tapadó gél korlátozza a külső behatásokkal, köztük a kémiai, mechanikai és hőingerekkel való érintkezést. Védő hatásának köszönhetően segíti a gyógyulás élettani folyamatának kezelését.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Kiseb sebekhez. Megfelelő szájhygiéniát követően vigyen fel 1 vagy 2 csepp gél az aftás fekély vagy seb teljes lefedéséhez. Kerülje a közvetlen érintkezést az applikátor és a sérülés között. Ha a seb nehezen elérhető helyen van, tiszta ujjal vagy egy gézdarab segítségével vigye fel a gél. A védőfilm akadálytalan kialakulása érdekében legalább 2 percig ne érintse meg a nyelvvel a sérülést. Használat után mindig zárja rá a kupakot. Használja napi 3-4 alkalommal vagy igény szerint a tünetek megszűnéséig. Harminc napi alkalmazás után tartson legalább egy hetes szünetet a kezelés újakezdése előtt. Az optimális eredmény érdekében az alkalmazás után legalább egy óráig kerülje az evést és ivást.

ÖSSZETÉTEL:

VÍZ, HIDROGÉNEZETT KEMÉNYÍTŐ-HIDRALIZÁTUM, GLICERIN, PVP, NÁTRIUM-CITRÁT, POLISZORBÁT 80, PVM/MA KOPOLIMER, MALTODEXTRIN, XANTÁNGUMI, PENTILÉN-GLIKOL, GLÜKONOLAKTON, NÁTRIUM-HIDROXID, PEG-40 HIDROGÉNEZETT RICINUSOLAJ, NÁTRIUM-HIALURONÁT, NÁTRIUM-BENZOÁT, ALOE

BARBADENSIS LEVÉL NEDVE, GLICERIL-KAPRILÁT/KAPRÁT, POLIKARBOFIL, ALTHAEA OFFICINALIS GYÖKÉR KIVONATA, SZUKRALÓZ, AROMA, KALCIUM-GLUKONÁT, KÁLIUM-SZORBÁT.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A kupakot minden használat után vissza kell zárni. Nincsenek a termék használatából adódó ismert mellékhatások, de a termék használata ellenjavallt az összetevők bármelyikével szembeni ismert túlérzékenység esetén. Forduljon kezelőorvosához, ha a tünetek nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak. A készítményt a szájüregben kell helyileg alkalmazni, és nem szabad lenyelni. A készítmény véletlen lenyelése esetén nem várhatók mellékhatások. A csomagoláson feltüntetett lejárati idő után ne alkalmazza ezt a készítményt. A készítmény gyermekektől elzárva tartandó! Ne használja, ha a csomagolás sérült vagy fel van nyitva. A keresztszenyveződés elkerülése érdekében csak egyetlen betegnél szabad használni a készítményt. Kerülni kell a szembe jutást. A készítményt terhesség és szoptatás során nem értékelték. Ha Ön terhes vagy szoptat, akkor használat előtt beszéljen kezelőorvosával. Gyermekeknél 4 éves kortól alkalmazható.

TÁROLÁS:

A lejárati idő megfelelően tárolt, bontatlan csomagolásban lévő készítményre vonatkozik. Az eredeti csomagolásban, száraz helyen, fénytől és hőforrásoktól védve tárolandó. Ne tárolja hűtőszekrényben a készítményt. Szobahőmérsékleten tárolandó.

Méret: 8 ml-es E tubus

Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milánó, Olaszország

Orvostechnikai eszköz

Forgalmazó:

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Németország

Felülvizsgálat dátuma:

2023. június

Szimbólum						
Magyarázat	Az orvostechnikai eszköz jogszert gyártója	CE-jelölés és bejelentett szervezet	Fontos információkért olvassa el a használati utasítást	Lejárati idő	Gy.sz.	Fontos információkért olvassa el a használati utasítást

HU / V109369/01
TR2900321 OALL2FI00175