

Anaftin® Baby

Gel gingival

Pentru ameliorarea durerii asociate erupției dentare

Instrucțiuni de utilizare:

Anaftin® Baby Gel gingival este destinat pentru a fi utilizat în cavitatea bucală pentru ameliorarea disconfortului și a durerii asociate erupției dentare.

Anaftin® Baby Gel gingival formează rapid o peliculă invizibilă care protejează gingia de durerea și disconfortul asociate erupției dentare. Ingredientele sale contribuie la reducerea durerii și a înroșirii în zonele afectate.

În timpul utilizării, cu aplicatorul, prevăzut cu peri din silicon, se masează delicat gingiile inflamate și iritate, oferind o ameliorare temporară a durerii în timpul aplicării. Aceasta face ca aplicarea gelului să fie mai puțin iritantă pentru sugar și mai ușor de efectuat de către părinte.


Anaftin® Baby Gel gingival are un gust plăcut de banane.

Anaftin® Baby Gel gingival nu conține lactoză, zahăr, alcool sau anestezic local.




Instrucțiuni de utilizare:

Aplicați o cantitate de produs de mărimea unui bob de mazăre și masați delicat gingia cu ajutorul aplicatorului. La sugari, este de preferat să aplicați gelul după masă și înainte ca bebelușul să adoarmă, pentru a favoriza formarea peliculei și a prelungi ameliorarea durerii. Utilizați de 3-4 ori pe zi, la nevoie. După fiecare utilizare, puneți la loc capacul peste aplicator. Anaftin® Baby Gel gingival este potrivit pentru utilizare la copii cu vârsta peste 3 luni.

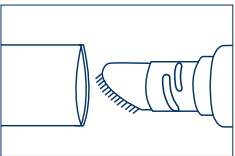


1. Scoateți capacul

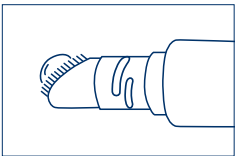

2. Stoarceți o cantitate de mărimea unui bob de mazăre pe aplicator și mențineți apăsat




3. Aplicați pe zona afectată și masați cu aplicatorul

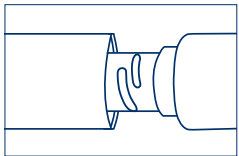


4. Puneți capacul la loc

Înainte de a utiliza produsul, îndepărtați orice reziduu uscat cu mâinile curate și uscate.

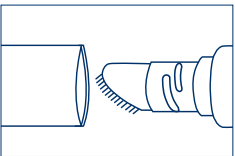


1. Scoateți capacul

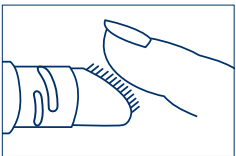

2. Îndepărtați reziduurile uscate cu mâinile curate și uscate




3. Utilizați așa cum este indicat mai sus

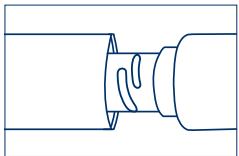

4. Puneți capacul la loc

Toți bebelușii au erupții dentare în etape diferite, însă acesta este un ghid general pentru a ști la ce să vă așteptați.

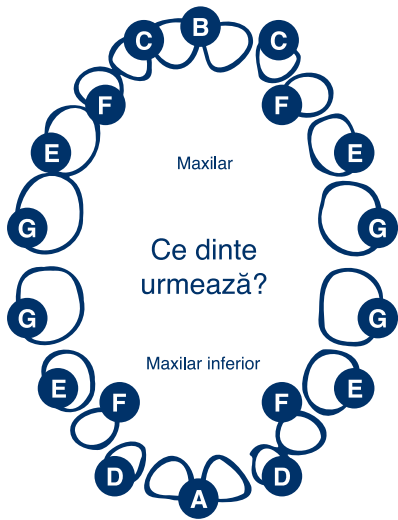

- A** 5 – 7 luni
Dinții frontali inferiori (incisivii) de obicei apar primii
- B** 6 – 8 luni
Apar dinții frontali superiori (incisivii)
- C** 9 – 11 luni
Apar incisivii laterali superiori, de fiecare parte a dinților frontali superiori
- D** 10 – 12 luni
Apar incisivii laterali inferiori, de fiecare parte a dinților frontali inferiori
- E** 12 – 16 luni
Apar molarii (dinții din spate)
- F** 16 – 20 luni
Apar caninii
- G** 20 – 30 luni
Apar molarii secundari (dinții din spate)

Ingrediente:

Aqua, PVP (12%), maltodextrin, propylene glycol, PEG-40 hydrogenated castor oil, aloe barbadensis leaf extract, crocus sativus extract, xanthan gum, aroma, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium hyaluronate (0.1%), xylitol, disodium EDTA, cetylpyridinium chloride, glycyrrhetic acid.

Contraindicații, atenționări și precauții pentru utilizare:

Fiecare tub de Anaftin® Baby Gel gingival trebuie utilizat la un singur pacient pentru a evita contaminarea încrucișată a aplicatorului și a gelului. Utilizarea Anaftin® Baby Gel gingival este contraindicată la pacienții cu antecedente de hipersensibilitate la oricare dintre excipienții produsului. Nu utilizați dacă sunteți gravidă sau credeți că ați putea fi gravidă sau dacă alăptați. Nu lăsați la îndemâna copiilor. **Produsul trebuie aplicat numai de către un adult. AVERTISMENT:** Acest dispozitiv medical nu este o jucărie. Nu îl lăsați **NICIODATĂ** în mâinile unui copil, pentru a evita riscul de asfixiere. Verificați dispozitivul medical înainte de a-l utiliza, urmărind orice semn de uzură, și aveți grijă ca, pe durata aplicării gelului, nicio parte a capului aplicator să nu se detașeze în mod accidental. Dacă se întâmplă acest lucru, nu mai folosiți acest dispozitiv medical. Nu încercați să reasamblați piesa detașată. Nu utilizați dacă tubul este deschis sau deteriorat. Orice incident care apare în timpul utilizării acestui produs trebuie raportat producătorului pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Deteriorarea gravă a stării de sănătate care apare în legătură cu acest produs trebuie raportată și autorităților competente din țara dumneavoastră.

Conținut: tub de 10 ml

A se păstra la temperaturi între 5°C-25°C. Nu mai utilizați dispozitivul medical după terminarea gelului. Nu utilizați după data de expirare.

Rev 1: 07-2024

 Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire SN15 2BB,
Regatul Unit

 Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 XOCT, Irlanda

 Distribuit de: Berlin-Chemie AG
Glienicke Weg 125
12489 Berlin, Germania

     www.alliancepharmaceuticals.com

 1282

 Dispozitiv medical

TR3200721
V156325
020744