

Anaftin® Baby

Gel kod nicanja zuba

Za brzo ublažavanje bola i neprijatnosti povezanih sa nicanjem zuba

Namena:

Anaftin® Baby Teething Gel je namenjen za upotrebu u usnoj duplji za ublažavanje nelagodnosti i bola povezanih sa nicanjem zuba.

Anaftin® Baby Teething Gel brzo stvara nevidljivi sloj koji štiti desni od osećaja neprijatnosti i bola, uzrokovanih nicanjem zuba. Njegovi sastojci pomažu u ublažavanju bola i crvenila u zahvaćenim područjima.

Tokom upotrebe, aplikator svojim silikonskim vlaknima nežno masira bolne, iritirane desni i dovodi do privremenog ublažavanja bola tokom aplikacije. Ovo čini nanošenje gela manje neprijatnim za odojče i lakšim za upotrebu od strane roditelja.


Anaftin® Baby Teething Gel ima prijatan ukus banane.

Anaftin® Baby Teething Gel ne sadrži šećer, alkohol ni lokalne anestetike.




Uputstvo za upotrebu:


Nanesite dovoljno gela da pokrije zahvaćeno područje i aplikatorom nežno izmasirajte desni. Preporučuje se primena nakon obroka, kao i pre odlaska bebe na spavanje, kako bi se pospešilo stvaranje zaštitnog sloja i produžilo dejstvo na ublažavanje bola kod deteta. Koristite 3-4 puta dnevno, po potrebi. Nakon svake upotrebe vratite zatvarač na vrh aplikatora. Anaftin® Baby Teething Gel je pogodan za upotrebu kod dece starije od 3 meseca.

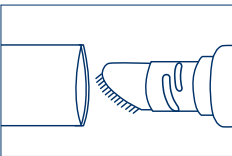


1. Skinite zatvarač

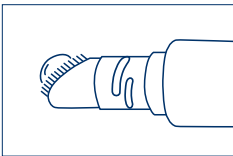

2. Istisnite količinu veličine graška na aplikator i nastavite da pritiskate

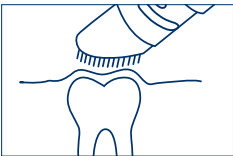


3. Nanesite na zahvaćeno područje i masirajte aplikatorom

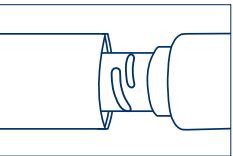


4. Vratite zatvarač

Pre upotrebe proizvoda uklonite sve suve ostatke čistim i suvim rukama

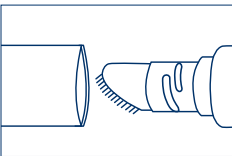


1. Skinite zatvarač

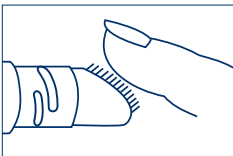

2. Uklonite suve ostatke čistim i suvim rukama



3. Koristite kako je gore prikazano

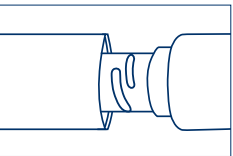

4. Vratite zatvarač

Zubi niču različitom brzinom kod beba. Ovo je opšti vodič o tome šta možete očekivati.



- A** 5 – 7 meseci
Prednji donji zubi (sekutići) obično izbijaju prvi
- B** 6 – 8 meseci
Pojavljaju se prednji gornji zubi (sekutići)
- C** 9 – 11 meseci
Niču gornji bočni sekutići, sa obe strane gornjih prednjih zuba
- D** 10 – 12 meseci
Niču donji bočni sekutići sa obe strane donjih prednjih zuba
- E** 12 – 16 meseci
Pojavljaju se kutnjaci (zadnji zubi)
- F** 16 – 20 meseci
Očnjaci izlaze
- G** 20 – 30 meseci
Javljaju se drugi kutnjaci (zadnji zubi)

Sastav:

Aqua, PVP (12%), maltodekstrin, propilen glikol, PEG-40 hidrogenizovano ricinusovo ulje, *Aloe barbadensis* ekstartk lista, *Crocus sativus* ekstrakt, ksantan guma, aroma, kalijum sorbat, natrijum benzoat, natrijum hijaluronat (0.1%), ksilitol, dinatrijum EDTA, cetilpiridinijum hlorid, gliciretinska kiselina.

Kontraindikacije, upozorenja i mere opreza:

Svaku tubu Anaftin® Baby Teething Gela treba da koristi samo jedna osoba, kako bi se izbegla unakrsna kontaminacija aplikatora i gela. Upotreba Anaftin® Baby Teething Gela je kontraindikovana kod pacijenata sa poznatom preosetljivošću na bilo koji od sastojaka. Ne koristiti ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite. Čuvati van domašaja dece. **Proizvod može nanositi isključivo odrasla osoba. OPREZ:** Ovo medicinsko sredstvo nije igračka. **NIKADA** ga ne ostavljajte u rukama deteta. Postoji opasnost od gušenja. Pre upotrebe proverite ima li na medicinskom sredstvu znakova istrošenosti i vodite računa o tome da se tokom primene gela nijedan deo glave aplikatora slučajno ne odvoji. Ako se to dogodi, prestanite da ga koristite. Nemojte pokušavati da ponovo sastavite odvojeni deo. Ne koristiti u slučaju da je tuba otvorena ili oštećena. Svaki incident koji se dogodi tokom upotrebe ovog proizvoda treba prijaviti proizvođaču pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Ozbiljno pogoršanje zdravlja koje se dogodilo u vezi sa ovim proizvodom takođe treba prijaviti nadležnom organu vaše zemlje.

Sadržaj: tuba 10 ml

Čuvati na temperaturi od 5°C do 25°C. Prestanite sa korišćenjem medicinskog sredstva kada se gel potroši.

Ne korisiti nakon isteka roka upotrebe.

Datum revizije 07/2024

Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire SN15 2BB,
Velika Britanija

Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 X0CT, Irska

Ovlašćeni predstavnik:
BERLIN-CHEMIE A. MENARINI DISTRIBUTION D.O.O.
Beograd-Novi Beograd, Djordja Stanojevića 14
Farmalogist d.o.o., Mirijeovski bulevar 3, 11 060
Beograd, Palilula
Vega d.o.o., Vuka Karadžića 41, 14 000 Valjevo
Phoenix pharma d.o.o., Bore Stankovića 2, 11 250
Beograd, Makiš
Broj rešenja o upisu u Registar medicinskih sredstava:
001940506 2024 od 23.10.2024.

TR3193016
V156360
020737

