

Anaftin® Baby

Żel na ząbkowanie

Łagodzi ból związany z ząbkowaniem

Przeznaczenie:

Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie jest przeznaczony do stosowania w jamie ustnej. Łagodzi dyskomfort i ból związany z ząbkowaniem: wyrzynaniem się zęba.

Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie szybko tworzy niewidoczną warstwę, która pomaga chronić dziąsła przed uczuciem bólu i dyskomfortu związanego z ząbkowaniem. Jego składniki pomagają zmniejszyć ból i zaczerwienienie zmienionych miejsc.

Podczas stosowania aplikator wyposażony w silikonową szczoteczkę delikatnie masuje bolesne, podrażnione dziąsła i może złagodzić ból podczas aplikacji. Dzięki temu aplikacja żelu jest mniej uciążliwa dla niemowlęcia, a rodzicowi łatwiej jest nałożyć produkt.


Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie ma przyjemny bananowy smak.

Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie nie zawiera laktozy, cukru, alkoholu ani środków miejscowo znieczulających.




Instrukcja użycia:


Należy nałożyć ilość żelu wielkości ziarnka grochu na zmienioną okolice, a następnie delikatnie masować dziąsła aplikatorem. U niemowląt najlepiej stosować po posiłku i przed snem, aby umożliwić wytworzenie się warstwy ochronnej i uzyskać jak najdłuższą ulgę w bólu. Stosować 3-4 razy na dobę, w razie potrzeby. Zakręcać po każdym użyciu. Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie jest odpowiedni do stosowania u dzieci w wieku powyżej 3 miesięcy.

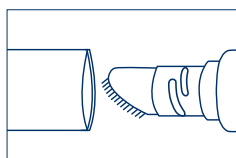


1. Zdejmij zakrętkę

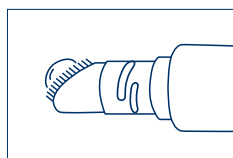

2. Wyciśnij na aplikator ilość żelu wielkości ziarnka grochu ściskając tubkę

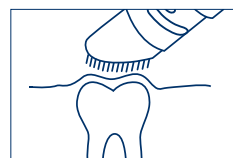


3. Nałóż na zmienioną okolice, wmasowując żel aplikatorem

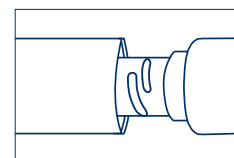


4. Zakręć zakrętkę


Przed kolejnym użyciem produktu usuń zaschniętą pozostałość czystymi, suchymi dłońmi

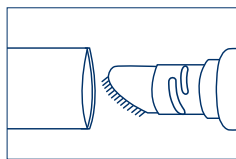


1. Zdejmij zakrętkę

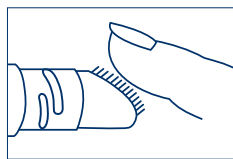

2. Usuń zaschniętą pozostałość czystymi, suchymi dłońmi

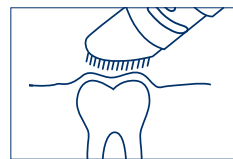

3. Stosuj jak wskazano powyżej

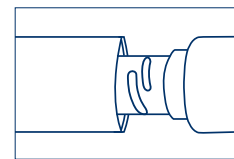

4. Zakręć zakrętkę

Każde dziecko ząbkuje w różnym tempie, ale jest to ogólny kalendarz ząbkowania



- A** 5–7 miesięcy
Dolne przednie zęby (siekacze)
zwykle pojawiają się jako pierwsze
- B** 6–8 miesięcy
Pojawiają się górne przednie zęby (siekacze)
- C** 9–11 miesięcy
Pojawiają się górne boczne siekacze, po obu stronach górnych przednich zębów
- D** 10–12 miesięcy
Pojawiają się dolne boczne siekacze, po obu stronach dolnych przednich zębów
- E** 12–16 miesięcy
Pojawiają się zęby trzonowe (tyłne zęby)
- F** 16–20 miesięcy
Pojawiają się kły
- G** 20–30 miesięcy
Pojawiają się drugie zęby trzonowe (tyłne zęby)

Skład:

Woda, poliwinylpirolidon (12% PVP), maltodekstryna, glikol propylenowy, PEG-40 olej rycynowy uwodorniony, ekstrakt z liści aloesu zwyczajnego (Aloe barbadensis), ekstrakt z szafranu uprawnego (Crocus sativus), guma ksantanowa, aromat, sorbinian potasu, benzoesan sodu, kwas hialuronowy (0,1%), ksylitol, wersenian disodowy (EDTA), chlorek cetylpirydyny, kwas glicyryzynowy.

Przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności:

Każda tubka produktu Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie powinna być stosowana tylko przez jednego pacjenta, aby uniknąć zanieczyszczenia aplikatora i żelu. Stosowanie produktu Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie jest przeciwwskazane u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na którykolwiek z jego składników. Nie należy stosować jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią bądź przypuszcza że może być w ciąży. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. **Produkt powinien być nakładany wyłącznie przez osobę dorosłą. UWAGA:** Ten wyrób medyczny nie jest zabawką. Aby uniknąć ryzyka zadławienia, **NIGDY** nie zostawiaj go w rękach dziecka. Przed użyciem należy sprawdzić wyrób medyczny pod kątem śladów zużycia, a podczas aplikacji żelu zwrócić uwagę, aby nie doszło do przypadkowego odłączenia którejkolwiek części składowej główki aplikatora. W przypadku odłączenia należy przerwać stosowanie. Nie należy podejmować prób ponownego zamontowania odłączonej części. Nie należy stosować, jeśli tubka jest otwarta lub uszkodzona. Wszelkie zdarzenia, które miały miejsce podczas stosowania tego produktu, należy zgłaszać wytwórcy na adres pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Poważne pogorszenie stanu zdrowia, które nastąpiło w związku z stosowaniem tego produktu, należy również zgłosić właściwym organom w swoim kraju.

Zawartość: tubka 10 ml e

Przechowywać w temperaturze między 5°C a 25°C. Zaprzestać używania wyrobu po wyczerpaniu się żelu.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Data ostatniej aktualizacji: 07/2024

 Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire SN15 2BB,
Wielka Brytania

 Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 XOCT, Irlandia

 Dystrybutor: Berlin-Chemie AG
Glienicker Weg 125
12489 Berlin, Niemcy

 1282



Wyrób medyczny



www.alliancepharmaceuticals.com

TR3169916
V156352
020714