

Anaftin® Plus

Bioadhesive

umirujući gel



Ublažava bol kod oralnih ulkusa i malih oralnih lezija

INDIKACIJE:

Anaftin® Plus Bioadhesive umirujući gel koji ima mehaničko djelovanje (barijerni učinak) indiciran je za zbrinjavanje simptoma uzrokovanih aftoznim ulkusima, oralnim stomatitisom, ranicama u ustima, iritacijama usne šupljine i malim ozljedama usne šupljine uzrokovanim zubnim aparatićima i zubnim protezama. Svojim mehanizmom djelovanja dovodi do ublažavanja boli prijanjanjem uz površinu sluznice usta, umirivanjem oralnih lezija, smanjivanjem boli i nelagode. Gel struktura Anaftin® Plus Bioadhesive umirujućeg gela, zajedno s njegovim posebnim aplikatorom, osobito je indicirana za jasno vidljive i identificirane lezije. Formula gela sadrži sastojke koji snažno stvaraju film i imaju visoka mukoadhezivna svojstva. Gel stvara zaštitni film s barijernim učinkom (ili štitom) koji traje dulje od 12 sati. Štiti od vanjskih agensa, smanjujući rizik od daljnje iritacije. Gel prijanja uz oralne ulkuse i lezije te tako ograničava kontakt s vanjskim agensima kao što su kemijski, mehanički i toplinski podražaji. Zahvaljujući svom zaštitnom djelovanju, pomaže u fiziološkom procesu ozdravljenja.

UPUTE ZA UPORABU:

Za male izolirane lezije. Nakon pravilne oralne higijene, nanesite 1 ili 2 kapi gela kako biste prekrili cijeli ulkus ili leziju u ustima. Izbjegavajte izravan kontakt aplikatora s lezijom. Ako je lezija teško dostupna, nanesite gel čistim prstom ili gazom. Ne dodirujte leziju jezikom najmanje 2 minute kako biste omogućili stvaranje zaštitnog filma. Zatvorite zatvarač nakon svake primjene. Koristite 3-4 puta dnevno, ili po potrebi, dok simptomi ne nestanu. Nakon trideset dana primjene, obustavite primjenu na najmanje tjedan dana prije ponovnog početka liječenja. Za najbolje rezultate, nemojte jesti ili piti najmanje jedan sat nakon primjene.

SASTAV:

AQUA, HIDROGENIZIRANI ŠKROBNI HIDROLIZAT, GLICERIN, POLIVINILPIROLIDON (PVP), NATRIJEV CITRAT, POLISORBAT 80, PVM/MA KOPOLIMER, MALTODEKSTRIN, KSANTANSKA GUMA, PENTILENGLIKOL, GLUKONOLAKTON, NATRIJEV HIDROKSID, PEG-40, HIDROGENIZIRANO

RICINUSOVO ULJE, NATRIJEV HIJALURONAT, NATRIJEV BENZOAT, SOK OD LISTA *ALOE BARBADENSIS*, GLICERIL KAPRILAT/KAPRAT, POLIKARBOFIL, EKSTRAKT KORIJENA OBİČNOG BIJELOG SLJEZA, SUKRALOZA, AROMA, KALCIJEV GLUKONAT, KALIJEV SORBAT.

UPOZORENJA:

Nakon svake uporabe pažljivo zatvorite zatvarač. Nema poznatih štetnih događaja izazvanih primjenom proizvoda, međutim proizvod je kontraindiciran u bolesnika s poznatom preosjetljivošću na bilo koji od sastojaka u anamnezi. Ako simptomi potraju ili u slučaju pogoršanja simptoma, potražite savjet liječnika. Proizvod nije namijenjen za gutanje, već za topikalnu primjenu u usnoj šupljini. Ako se proizvod slučajno proguta, ne očekuju se nikakvi štetni učinci. Nemojte primjenjivati nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Čuvajte izvan pogleda i dohvata djece. Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno ili otvoreno. Proizvod treba koristiti samo jedan bolesnik kako bi se izbjegla križna kontaminacija. Izbjegavajte kontakt s očima. Proizvod nije ispitan tijekom trudnoće i dojenja. Ako ste trudni/dojite, posavjetujte se s liječnikom prije primjene. Prikladno za djecu od 4. godine života.

ČUVANJE:

Rok valjanosti odnosi se na neoštećeni proizvod koji je ispravno čuvan. Čuvati u originalnom pakiranju na suhom mjestu, daleko od izvora svjetlosti i topline. Proizvod nemojte odlagati u hladnjak. Čuvati pri sobnoj temperaturi.

Veličina: tuba od 8 ml e

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milano, Italija

Distributer:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Njemačka

Datum revizije 06-2023

Simbol		 0477				
Značenje	Ovlašteni proizvođač medicinskog proizvoda	CE oznaka prijavljenog tijela	Za važne informacije pročitajte upute za uporabu	Rok valjanosti	Broj serije	Za važne informacije pročitajte upute za uporabu

TR2902459
OALL2FI00173
HR / V109345/01