

Анафтин® Плюс

Биоадхезив

Биоадхезивен гел

BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Облекчаване на болката при афтозни язви и ранички в устата

ПОКАЗАНИЕ:
Биоадхезивният гел действа като механична бариера. Предназначен е за облекчаване на симптоми, причинени от афтозни язви, стоматит, рани в устата, раздразнения и малки наранявания на лигавицата на устата, дължащи се на брекети и протези. Механизмът на действие води до облекчаване на болката чрез прилепване към повърхността на лигавицата на устата, успокоява раничките, намалява болката и дискомфорта. Гелообразната форма на Анафтин® Плюс Биоадхезив, заедно със специалния апликатор го прави особено подходящ за употреба при ясно видими и установени ранички в устата. Гелът съдържа съставки с висока филмообразуваща способност и е силно мукоадхезивен; създава защитен филм като бариерен ефект (или щит), който продължава повече от 12 часа. Биоадхезивният гел предпазва от външни влияния, като свежда до минимум риска от по-нататъшно раздразнение. Гелът прилепва към афтите и раничките в устата, като ограничава контакта с външни фактори като химични, механични и термични дразнителни. Благодарение на защитното си действие, подпомага процеса на естествено заздравяване.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
За малки единични афти. След правилно почистване на устната кухина, нанесете 1 или 2 капки от гела, за да покриете цялата афта или раничка в устата. Избягвайте директен контакт на апликатора с раничката. Ако раничката е труднодостъпна, използвайте чист пръст или марля, за да нанесете гела. Не докосвайте раничката с език поне 2 минути, за да може да се образува защитният филм. Затваряйте капачката след всяко приложение. Използвайте 3-4 пъти на ден или при необходимост до изчезване на симптомите. След 30-дневна употреба прекъснете приложението за поне една седмица, преди да започнете отново лечението. За най-добри резултати не яжте и не пийте поне един час след нанасянето.

СЪСТАВ:
Вода, хидрогениран нишестен хидролизат, глицерин, поливинилпиридон (PVP), натриев цитрат, полисорбат 80, PVM/ МА кополимер, малтодекстрин, ксантанова гума, пентилен гликол, глюконолактон,

натриев хидроксид, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, натриев хиалуронат, натриев бензоат, сок от листата на Aloe barbadensis, глицерил каприлат/ капрат, поликарбофил, екстракт от корен на бяла ружа, сукралоза, аромат, калциев глюконат, калиев сорбат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Внимателно затваряйте капачката след всяка употреба. Няма известни нежелани реакции вследствие употребата на продукта. Биоадхезивният гел е противопоказан при пациенти с данни за свръхчувствителност към някоя от съставките. Ако симптомите продължават или в случай на влошаване на симптомите, потърсете медицинска помощ. Продуктът не е предназначен за поглъщане, а за локално приложение в устната кухина. При случайно поглъщане на продукта не се очакват неблагоприятни ефекти. Да не се използва след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се използва, ако опаковката е повредена или отворена. Продуктът трябва да се използва при един пациент, за да се избегне кръстосано замърсяване. Да се избягва контакт с очите. Продуктът не е оценяван по време на бременност и кърмене. Ако сте бременна/кърмите, консултирайте се с вашия лекар преди употреба. Подходящ за деца на възраст над 4 години.

СЪХРАНЕНИЕ:
Срокът на годност се отнася за правилно съхраняван и неотварян продукт. Да се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо място, далеч от източник на светлина и топлина. Не съхранявайте продукта в хладилник. Да се съхранява при стайна температура.

Размер на опаковката: туба 8 ml €

Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milan, Италия

Дистрибутор:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Германия

Ред. 06-2023

Символ		CE 0477			LOT	i
Значение	Легален производител на медицински изделия	CE маркировка от нотифициран орган	Викте инструкциите за употреба за важна информация	Срок на годност	Партиден номер	Викте инструкциите за употреба за важна информация

TR2906199
OALL2FIO0185
BG / V109326/01