

Aloclair® Plus Bioadhesive



ALÍVIO DA DOR DE ÚLCERAS NA BOCA E DE PEQUENAS LESÕES ORAIS

INDICAÇÃO

Aloclair® Plus Bioadhesive Gel Bioadesivo tem uma ação mecânica (efeito barreira) indicada no tratamento dos sintomas causados por úlceras aftosas, estomatites orais, feridas na boca, irritações orais e pequenas lesões orais devido ao uso de aparelhos dentários e de próteses dentárias. O seu mecanismo de ação conduz ao alívio da dor ao aderir à superfície da mucosa da boca, aliviando as lesões orais, reduzindo a dor e o desconforto. A apresentação em gel de Aloclair® Plus Bioadhesive Gel Bioadesivo, juntamente com o aplicador especial, é particularmente indicada para lesões claramente visíveis e identificadas. O Gel é formulado por ingredientes com uma grande capacidade de formar uma película altamente mucoadesiva: cria uma película protetora como efeito barreira (ou escudo) que dura mais de 12 horas. Protege de agentes externos, minimizando o risco de mais irritação adicional. O Gel adere às úlceras na boca e às lesões limitando o contacto com agentes externos, tais como estímulos químicos, mecânicos e térmicos. Devido à sua ação protetora, a película auxilia no processo fisiológico da cicatrização.

COMPOSIÇÃO

AQUA, HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE, GLYCERIN, PVP, SODIUM CITRATE, POLYSORBATE 80, PVM/MA COPOLYMER, MALTODEXTRIN, XANTHAN GUM, PENTYLENE GLYCOL, GLUCONOLACTONE, SODIUM HYDROXIDE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SODIUM HYALURONATE, SODIUM BENZOATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, GLYCERYL CAPRYLATE/CAPRATE, POLYCARBOPHIL, ALTHAEA OFFICINALIS ROOT EXTRACT, SUCRALOSE, AROMA, CALCIUM GLUCONATE, POTASSIUM SORBATE.

COMO UTILIZAR

Para lesões individuais pequenas. Após uma higiene oral correta, aplique 1 ou 2 gotas de gel para cobrir toda a úlcera ou lesão bucal. Evite o contacto direto do aplicador com a lesão. Se a lesão for de difícil acesso, aplique o gel com um dedo limpo ou uma compressa. Não toque com a língua na lesão durante pelo menos 2 minutos para permitir a formação de uma película protetora. Feche a tampa após cada aplicação. Utilize 3-4 vezes ao dia ou conforme necessário, até que os sintomas desapareçam. Após trinta dias de uso, suspenda a aplicação durante pelo menos uma semana antes de reiniciar o tratamento. Para obter melhores resultados, não coma nem beba durante pelo menos uma hora após a aplicação.

ADVERTÊNCIAS

Feche cuidadosamente a tampa após cada utilização. Não existem efeitos indesejáveis conhecidos decorrentes da aplicação deste produto. Porém, o seu uso está contraindicado em doentes com historial conhecido de hipersensibilidade a qualquer um dos seus componentes. Se os sintomas persistirem, ou em caso de agravamento dos sintomas, procure aconselhamento médico. O produto não se destina a ser ingerido, mas sim a ser aplicado topicamente na cavidade oral. Se engolir acidentalmente o produto, não se preveem efeitos adversos. Não utilizar após o prazo de validade indicado na embalagem. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Não utilize se a embalagem estiver danificada ou aberta. O produto deve ser usado por uma única pessoa para se evitar contaminação cruzada. Evitar o contacto com os olhos. O produto não foi avaliado durante a gravidez e amamentação. Se está grávida ou a amamentar, consulte o seu médico antes de utilizar este produto. Adequado para crianças a partir dos 4 anos de idade.

ARMAZENAMENTO

O prazo de validade refere-se ao produto intacto e armazenado corretamente. Conservar na embalagem original, num local seco e ao abrigo da luz e de fontes de calor. Não refrigerar o produto. Armazenar à temperatura ambiente.

Tamanho: Bisnaga de 8 ml e

Aloclair®, Alliance e dispositivos médicos associados são marcas registadas do Alliance Pharma PLC Group®.

Símbolo						
Significado	Fabricante legal do dispositivo médico	Marcação CE do organismo notificado	Consulte as instruções de utilização para obter informações importantes	Prazo de validade	Número de lote	Consulte as instruções de utilização para obter informações importantes

ALLIANCE

Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milano ITALY

RECORDATI

Jaba Recordati, S.A.
Av. Jacques Delors
Ed Inovação 1.2, Piso 0 - Taguspark
2740-122 Porto Salvo
Portugal

REF ALOPLUSGEL8MLJAB

Rev 03-2023
TR2833130
0ALL12F100163