

Anaftin® Baby

Igemegeel

Hammaste lõikumisega seotud valu leevendamiseks

Kasutusala:

Anaftin® Baby igemegeel on ette nähtud kasutamiseks suuõones hammaste lõikumisega seotud ebamugavustunde ja valu leevendamiseks.

Anaftin® Baby igemegeel moodustab kiiresti nähtamatu kaitsekihi, mis aitab kaitsta igemeid hammaste lõikumisega seotud valu eest ja leevendab ebamugavustunnet. Selle koostisosad aitavad vähendada kahjustunud piirkondades valu ja punetust.

Kasutamise ajal masseerib silikoonharjastega aplikaator õrnalt valulikke, ärritunud igemeid ja võib leevendada manustamise ajal ajutiselt valu. See muudab geeli manustamise imiku jaoks vähem stressi tekitavaks ja vanema jaoks hõlpsamaks.


Anaftin® Baby igemegeelil on meeldiv banaanimaitse.

Anaftin® Baby igemegeel ei sisalda laktoosi, suhkrut, alkoholi ega paikseid tuimasteid.




Kasutusjuhised:


Kandke aplikaatoriga herneterasuurune kogus toodet kahjustunud piirkonda ja masseerige igemeid õrnalt. Kaitsekihi moodustumise soodustamiseks ja valu pikaajaliseks leevendamiseks manustage imikutele eelistatavalt pärast toitmist ja enne magamajäämist. Kasutage vajaduse järgi 3–4 korda päevas. Pärast iga manustamiskorda pange kork tagasi aplikaatori peale. Anaftin® Baby igemegeel sobib kasutamiseks üle 3 kuu vanustel lastel.

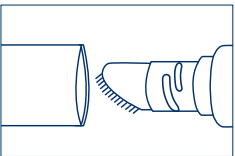


1. Eemaldage kork

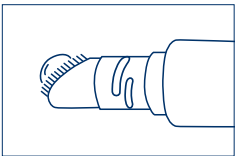

2. Pigistage aplikaatorile herneterasuurune kogus geeli ja hoidke kokkusurutuna

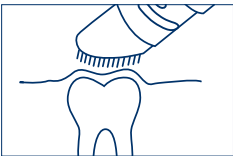


3. Kandke kahjustatud piirkonda ja masseerige aplikaatoriga

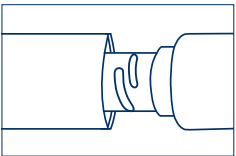


4. Pange kork tagasi peale

Enne toote kasutamist eemaldage kuivanud jäägid puhaste kuivade kätega.

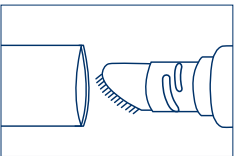


1. Eemaldage kork

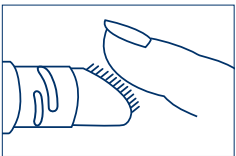

2. Eemaldage kuivanud jäägid puhaste kuivade kätega



3. Kasutage eespool toodud juhiste kohaselt

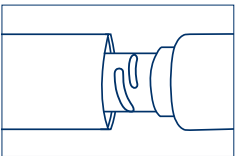

4. Pange kork tagasi peale

Igal imikul tulevad hambad erineva kiirusega, kuid üldjoontes võib oodata järgmist.



- A** 5 – 7 kuud
Tavaliselt ilmuvad esimesena alumised esihambad (lõikehambad)
- B** 6 – 8 kuud
Ilmuvad ülemised esihambad (lõikehambad)
- C** 9 – 11 kuud
Ilmuvad ülemised külgmised lõikehambad kummaldi pool ülemisi esihambaid
- D** 10 – 12 kuud
Ilmuvad alumised külgmised lõikehambad kummaldi pool alumisi esihambaid
- E** 12 – 16 kuud
Ilmuvad purihambad (tagahambad)
- F** 16 – 20 kuud
Ilmuvad silmahambad
- G** 20 – 30 kuud
Ilmuvad tagumised purihambad (tagahambad)

Koostisosad:

Vesi, PVP (12%), maltodekstriin, propüleenglükool, PEG-40 hüdrogeenitud kastoorõli, *Aloe barbadensis*'e leheekstrakt, *Crocus sativus*'e ekstrakt, ksantaankummi, lõhna- ja aroomaine, kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat, naatriumhüaluroonaat (0,1%), ksülitool, dinaatrium-EDTA, tsetüülpüridiinkloriid, glütsüürretiinhape.

Vastunäidustused, hoiatused ja ettevaatusabinõud kasutamisel:

Iga Anaftin® Baby igemegeeli tuubi võib kasutada ainult ühel patsiendil, et vältida aplikaatori ja geeli ristsaastumist. Anaftin® Baby igemegeeli kasutamine on vastunäidustatud patsientidel, kellel on esinenud mistahes koostisosa suhtes ülitundlikkust. Ärge kasutage raseduse, selle kahtluse või imetamise ajal. Hoida lastele kättesaamatus kohas. **Toodet võib manustada ainult täiskasvanu. ETTEVAATUST!** See meditsiiniseade ei ole mänguasi. Lõõgumisohtu vältimiseks ärge jätke seda **KUNAGI** laste kätte. Enne kasutamist kontrollige meditsiiniseadet igasuguste kulumismärkide suhtes ja geeli manustamise ajal jälgige, et aplikaatori pea mõni osa kogemata lahti ei tuleks. Sellisel juhul lõpetage kasutamine. Ärge püüdke lahti tulnud osa tagasi panna. Ärge kasutage, kui tuub on avatud või kahjustatud. Kõikidest toote kasutamise ajal aset leidnud ohujuhtumitest tuleb teatada tootjale aadressil pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Selle tootega seotud tõsistest tervisekahjustustest tuleb teatada ka teie asukohariigi pädevale asutusele.

Sisu: 10 ml e tuub.
Hoida temperatuuril 5 °C kuni 25 °C Pärast geeli otsalõppemist lõpetage seadme kasutamine. Mitte kasutada pärast kõlblikkusaja lõppu.

Version 1: 2024-07

 Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire SN15 2BB,
Ühendkuningriik

 Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 X0CT, Iirimaa

 Levitaja: Berlin-Chemie AG
Glienicke Weg 125
12489 Berliin, Saksamaa


 Meditsiiniseade
 www.alliancepharmaceuticals.com

 1282

TR3200736
V156344
020755