

Анафтин® бебе

гел при никнене на зъбки

За облекчение на болка при никнене на зъбки

Предназначение:


Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки е предназначен за използване в устната кухина за облекчаване на дискомфорта и болката, свързани с никнене (пробив) на зъбки.

Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки бързо образува невидим филм, който помага за предпазване на венците от болката и дискомфорта, свързани с никненето на зъбки. Съставките му помагат за намаляване на болката и зачервяването в засегнатите участъци.

По време на употреба апликаторът, снабден със силиконови влакна, нежно масажира възпалените, раздразнени венци и може да осигури временно облекчаване на болката по време на нанасяне. Това прави нанасянето на гела по-малко травмиращо за бебето и по-лесно за родителя.


Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки има приятен вкус на банан.

Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки не съдържа лактоза, захар, алкохол и локален анестетик.

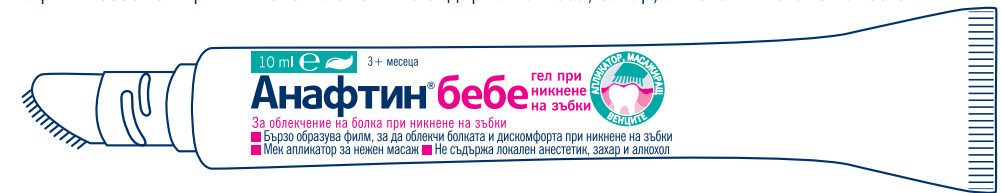


Указания за употреба:


Нанесете количество колкото грахово зърно от продукта върху засегнатата зона и нежно масажирайте венците с апликатора. При кърмачета за предпочитане е да се прилага след хранене и преди бебето да заспи, за да се улесни образуването на филма и за по-дълго облекчение на болката. Използвайте 3-4 пъти дневно при необходимост. Затваряйте капачката след всяко приложение. Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки е подходящ за приложение при деца на възраст над 3 месеца.

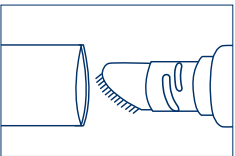


1. Отстранете капачката

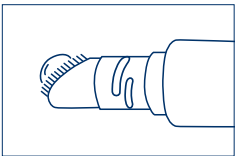

2. Изстискайте количество с размер на грахово зърно върху апликатора, като притискате тубата

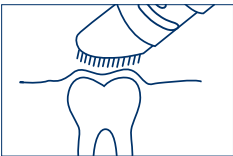


3. Нанесете върху засегнатата зона и масажирайте с апликатора

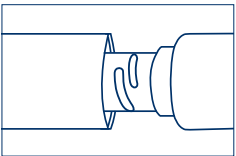


4. Поставете отново капачката

Преди да използвате продукта, отстранете всички засъхнали остатъци с чисти и сухи ръце.

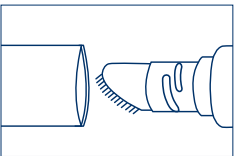


1. Отстранете капачката

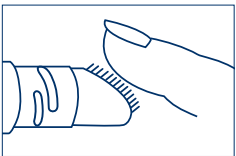

2. Отстранете засъхналите остатъци с чисти и сухи ръце



3. Използвайте, както е посочено по-горе

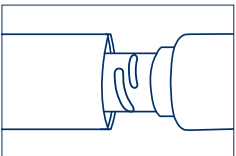

4. Поставете отново капачката

При бебетата зъбките никнат с различна скорост, но най-често в този ред:

Горна челюст

Кой е следващият зъб?

Долна челюст

A 5 – 7 месеца
Обикновено първи изникват долните предни зъби (резци)

B 6 – 8 месеца
Поникват горни предни зъби (резци)

C 9 – 11 месеца
Поникват горните странични резци от двете страни на горните предни зъби

D 10 – 12 месеца
Поникват долните странични резци, от двете страни на долните предни зъби

E 12 – 16 месеца
Поникват кътници (задни зъби)

F 16 – 20 месеца
Поникват кучешките зъби

G 20 – 30 месеца
Поникват втори кътници (задни зъби)

Състав:

Вода, поливинилпирилодон (PVP) (12%), малтодекстрин, пропилен гликол, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, екстракт от листа на *Aloe barbadensis*, екстракт от *Crocus sativus*, ксантанова гума, аромат, калиев сорбат, натриев бензоат, натриев хиалуронат (0,1%), ксилитол, динатриев EDTA, цетипиридиниев хлорид, глициретинова киселина.

Противопоказания, предупреждения и предпазни мерки:

Всяка туба Анафтин® бебе гел при никнене на зъбки трябва да се използва само при един-единствен пациент, за да се избегне кръстосано замърсяване на апликатора и гела. Употребата на Anaftin® бебе гел при никнене на зъбки е противопоказана при пациенти с данни за свръхчувствителност към някоя от съставките. Не използвайте, ако сте бременна или смятате, че сте бременна или кърмите. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. **Продуктът трябва да се прилага само от възрастен. ВНИМАНИЕ:** Това медицинско изделие не е играчка. **НИКОГА** не го оставяйте в ръцете на дете, за да избегнете риск от задавяне. Проверете медицинското изделие преди употреба за признаци на износване и внимавайте по време на прилагането на гела да не се отдели случайно някоя от съставните части на главата на апликатора. В такъв случай преустановете употребата. Не се опитвайте да сглобите отново отделената част. Не използвайте, ако тубата е отворена или повредена. Всеки инцидент, възникнал по време на употребата на този продукт, трябва да бъде докладван на производителя pharmacovigilance@alliancepharma.co.uk. Сериозно влошаване на здравето, настъпило във връзка с употребата на този продукт, също трябва да бъде докладвано на компетентните органи във вашата държава.

Съдържание: туба 10 ml 

Да се съхранява между 5°C и 25°C. Спрете да използвате изделието, след като гелът свърши.

Да не се използва след срока на годност.

Ред 1: 08.2024

 Alliance Pharmaceuticals Ltd.
Avonbridge House, Bath Road,
Chippenham, Wiltshire SN15 2BB,
Великобритания

 Alliance Pharma (Ireland) Ltd.
United Drug House, Magna Drive,
Dublin D24 X0CT, Ирландия

 Дистрибутор: Berlin-Chemie AG
Glienicke Weg 125
12489 Berlin, Германия



Медицинско изделие



www.alliancepharmaceuticals.com



1282

TR3192987
V156368
020731