

Anaftin® Plus

Bioadhesive

bioadhezinis
purškalas



Burnos opų ir mažų burnos pažeidimų skausmo malšinimas

INDIKACIJA

Anaftin® Plus Bioadhesive bioadhezinis purškalas veikia mechaniškai (barjerinis poveikis), jis skirtas aftinių opų, burnos stomatito, burnos žaizdelių, burnos dirginimo ir nedidelių, breketų ir protezų sukeltų burnos sužalojimų simptomams malšinti. Jis ypač skirtas esant burnos opoms ir pažeidimams, kuriuos sunku pasiekti. Jo veikimo mechanizmas padeda malšinti skausmą, priemonei prilipus prie burnos gleivinės paviršiaus, jis ramina burnos pažeidimus, mažina skausmą ir diskomfortą. Purškalo sudėtyje yra medžiagų, turinčių didelę galią plėvelei suformuoti, kurios labai gerai sukimba su gleivine. Jis sukuria apsauginę plėvelę kaip barjerą (arba skydą), kuri išlieka ilgiau nei 10 valandų. Jis apsaugo nuo išorinių veiksnių, sumažindamas tolesnio dirginimo riziką. Purškalas prilimpa prie burnos opų ir pažeidimų, ribodamas sąlytį su išoriniais veiksniais, tokiais kaip cheminiai, mechaniniai ir terminiai dirgikliai. Dėl savo apsauginio poveikio jis padeda valdyti fiziologinį gijimo procesą.

KAIP NAUDOTI

Pavieniams pažeidimams. Priemonę naudodami pirmą kartą, nuimkite dangtelį ir uždėkite purkštuką. Atlikę tinkamą burnos higieną, nukreipkite purkštuką link pažeidimo burnos viduje ir papurškite 2–4 kartus, kad padengtumėte pažeistą vietą ir susidarytų barjerinė plėvelė. Nelieskite pažeidimo liežuviu mažiausiai 2 minutes, kad susidarytų apsauginė plėvelė. Purkštukas leidžia priemonei maksimaliai efektyviai padengti burnos pažeidimus. Priemonę vartokite 3-4 kartus per dieną arba pagal poreikį, kol simptomai išnyks. Po trisdešimties vartojimo dienų, prieš tęsdami gydymą nebevartokite bent vieną savaitę. Kad būtų pasiektas geriausias poveikis, nevalgykite ir negerkite mažiausiai vieną valandą po pavartojimo.

SUDĖTIS

VANDUO, GLICERINAS, HIDRINTAS KRAKMOLO HIDROLIZATAS, NATRIO CITRATAS, POLISORBATAS 80, PVM/MA KOPOLIMERAS, MALTODEKSTRINAS, PENTILENGLIKOLIS, GLIUKONOLAKTONAS, PEG-40 HIDRINTAS RICINOS ALIEJUS, POLIVINILO PIROLIDONAS (PVP), NATRIO HIDROKSIDAS, NATRIO BENZOATAS, ALIJOSIAUS (ALOE BARBARENSIS) LAPŲ

SULTYS, GLICERILKAPRILATAS/KAPRATAS, POLIKARBOFILAS, KSANTANO LIPAI, VAISTINĖS SVILAROŽĖS ŠAKNIES EKSTRAKTAS, NATRIO HIALURONATAS, SUKRALOŽĖ, KVAPIOJI MEDŽIAGA, KALCIO GLIUKONATAS, KALIO SORBATAS.

ISPĖJIMAI

Kiekvieną kartą panaudoję kruopščiai uždenkite dangteliu. Nėra žinomų šalutinių poveikių, kuriuos sukeltų priemonės naudojimas, tačiau ji yra kontraindikuotina pacientams, kuriems anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai sudėtyje esančiai medžiagai. Jeigu simptomai išlieka ar pablogėja, kreipkitės į gydymo įstaigą. Priemonė neskirta nuryti. Ją reikia vartoti vietškai burnos ertmėje. Atsitiktinai nurijus priemonės, nepageidaujamų poveikių nesitikima. Nenaudokite pasibaigus galiojimo terminui, kuris nurodytas ant pakuotės. Laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite, jeigu pakuotė yra pažeista arba atidaryta. Priemonę gali naudoti tik vienas pacientas, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo. Stenkitės, kad nepatektų į akis. Priemonė nebuvo vertinta nėštumo ir žindymo laikotarpiu. Jeigu esate nėščia / žindote, prieš naudojimą pasitarkite su gydytoju. Tinka vaikams nuo 4 metų amžiaus.

LAIKYMAS

Galiojimo terminas taikomas nepažeistai tinkamai laikomai priemonei. Laikykite gamintojo pakuotėje sausoje vietoje atokiai nuo šviesos ir šilumos šaltinio. Nelaikykite priemonės šaldytuve. Laikykite kambario temperatūroje.

Turinys: 15 ml e buteliukas su įpakuotu purkštuku.

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milan, Italija

Platintojas:

BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlynas, Vokietija

Peržiūrėta 2023-06

Simbolis		 0477				
Reikšmė	Medicinos priemonės teisėtai gamintojas	CE ženklas, išduotas notifikuotosios įstaigos	Svarbi informacija, žr. naudojimo instrukcijose	Galioja iki	Serijos numeris	Svarbi informacija, žr. naudojimo instrukcijose

LT / V109039/01
TR2904972
OALL2FI00180