

Анафтин®

Плюс

Биоадхезив

Биоадхезивен спрей

BERLIN-CHEMIE

MENARINI

Облекчаване на болката при афтозни язви и ранички в устата

ПОКАЗАНИЕ:
Биоадхезивният спрей действа като механична бариера. Предназначен е за облекчаване на симптоми, причинени от афтозни язви, стоматит, рани в устата, раздразнения и малки наранявания на лигавицата на устата, дължащи се на брекети и протези. Особено подходящ е за афти и труднодостъпни ранички в устата. Механизмът на действие води до облекчаване на болката чрез прилепване към повърхността на лигавицата на устата, успокоява раничките, намалява болката и дискомфорта. Спреят съдържа съставки с висока филмообразуваща способност и е силно мукоадхезивен; създава защитен филм като бариерен ефект (или щит), който продължава повече от 10 часа. Биоадхезивният спрей предпазва от външни влияния, като свежда до минимум риска от по-нататъшно раздразнение. Спреят прилепва към афтите и раничките в устата, като ограничава контакта с външни фактори като химични, механични и термични дразнителни. Благодарение на защитното си действие, подпомага процеса на естествено заздравяване.

НАЧИН НА УПОТРЕБА:
За малки единични афти. Когато използвате продукта за първи път, свалете капачката и поставете накрайника. След правилно почистване на устната кухина насочете накрайника към раничката в устата и пръснете 2-4 пъти, за да покриете засегнатата област и да създадете бариерен филм. Не докосвайте раничката с език поне 2 минути, за да може да се образува защитният филм. Накрайникът позволява на продукта да покрие раничките в устата с максимална ефективност. Прилагайте продукта 3-4 пъти на ден или при необходимост до изчезване на симптомите. След 30-дневна употреба прекъснете приложението за поне една седмица, преди да започнете отново лечението. За най-добри резултати избягвайте да ядете и пиете поне един час след нанасянето.

СЪСТАВ:
Вода, глицерин, хидрогениран нишестен хидролизат, натриев цитрат, полисорбат 80, PVM/МА кополимер, малтодекстрин, пентилеи гликол, глюконолактон, PEG-40 хидрогенирано рициново масло, поливинилпиролidon (PVP), натриев хидроксид,

натриев бензоат, сок от листата на Aloe barbadensis, глицерил каприлат/ капрат, поликарбофил, ксантанова гума, екстракт от корен на бяла ружа, натриев хиалуронат, сукралоза, аромат, калциев глюконат, калиев сорбат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Внимателно затваряйте капачката след всяка употреба. Няма известни нежелани реакции вследствие употребата на продукта. Биоадхезивният спрей е противопоказан при пациенти с данни за свръхчувствителност към някоя от съставките. Ако симптомите продължават или в случай на влошаване на симптомите, потърсете медицинска помощ. Продуктът не е предназначен за поглъщане, а за локално приложение в устната кухина. При случайно поглъщане на продукта не се очакват неблагоприятни ефекти. Да не се използва след изтичане на срока на годност, отбелязан върху опаковката. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Да не се използва, ако опаковката е повредена или отворена. Продуктът трябва да се използва при един пациент, за да се избегне кръстосано замърсяване. Да се избягва контакт с очите. Продуктът не е оценяван по време на бременност и кърмене. Ако сте бременна/кърмите, консултирайте се с вашия лекар преди употреба. Подходящ за деца на възраст над 4 години.

СЪХРАНЕНИЕ:
Срокът на годност се отнася за правилно съхраняван и неотварян продукт. Да се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо място, далеч от източник на светлина и топлина. Не съхранявайте продукта в хладилник. Да се съхранява при стайна температура.

Размер на опаковката: Бутилка от **15 ml** € с накрайник.

 Biokosmes s.r.l.
Via Besana 10,
20122 Milan, Италия

Дистрибутор:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP),
Glienicke Weg 125,
12489 Berlin, Германия

Ред. 06-2023

Символ						
Значение	Легален производител на медицински изделия	CE маркировка от нотифициран орган	Вижте инструкциите за употреба за важна информация	Срок на годност	Партиден номер	Вижте инструкциите за употреба за важна информация

TR2905876
OALL2FI00184
BG / V109329/01